





Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung



Der Lagerungsschrank darf ausschließlich von Fachpersonal mit ausreichender Schulung in der Benutzung des Gerätes bedient werden.

1	<p><b>Endoskop einlagern:</b></p> <p>Scannen Sie Ihren persönlichen Barcode ein und melden Sie sich somit an. Öffnen Sie die Tür.</p>	
2	<p>Legen Sie das Endoskop in einen freien Auszug und scannen Sie es ein. Scannen Sie den verwendeten Auszug und schieben Sie diesen ein.</p>	
3	<p>Weiteres Endoskop einlegen? <i>Ja</i> → Schritt 2 wiederholen <i>Nein</i> → Tür schließen</p>	