



DESIFOR- QUICK PLUS *wipes*

Flächendesinfektionstücher • begrenzt viruzid • Medizinprodukt

Einsatzbereich

Zur rückstandsfreien Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im medizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendung

Zu desinfizierende, saubere Fläche mit dem getränktem Tuch gründlich wischen und abtrocknen lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit beachten. Reichweite pro Tuch ist abhängig von der Oberflächenstruktur, ca. 0,3 m².

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich, bakterizid und levurozid	konz. 5 Min.	EN 13727, EN 13624, EN 16615 hohe und niedrige Belastung
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen, bakterizid u. levurozid	konz. 1 Min.	EN 1276, EN 1650, EN 13697 hohe und niedrige Belastung
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek.	EN 14348 niedrige Belastung
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 30 Sek.	DVW/RKLeitlinie
Noroviren (MNV)	konz. 1 Min.	EN 14476
Rotaviren	konz. 30 Sek.	EN 14476

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Gebrauchsfertige Tücher (EN 16615, 4-Felder-Test)
- Tuchgröße 14 x 20 cm, Tuchqualität 23 g/m²
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 3 Monate
- IHO-gelistet

Hinweis

Flüssigkeiten und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Technische Informationen

Karton mit 12 Dosen
à 120 Tücher (120er Pack) Art.-Nr. 00554
Karton mit 12 Nachfüllbeutel
à 120 Tücher (120er Pack) Art.-Nr. 00553

Zubehör

Wandhalterung Dose Art.-Nr. 80031

Wirkstoffe

100 g Tränkflüssigkeit DESIFOR-QUICK PLUS enthält
45,0 g Ethanol

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008
(CLP): Achtung; GHS02

BAuA Reg.-Nr. N-35553; N-35554
CHZN1999



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0820

pH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE