

Prüfmittelausstattung, Sterilisations-/Desinfektionsgerät Packanleitung Transportkoffer 2/2

	2.1	Transportkoffer klein, komplett mit Schaumstoff	1 x
Verpacken Sie die Teile in der im folgenden angegebenen Reihenfolge im Transportkoffer.			



BESCHÄDIGUNG DER ELEKTRODEN!

Wenn die pH-Elektrode 2.11.4 nicht benutzt wird, muss sie immer im Transportschutz mit CaCl-Lösung 2.11.4.1 aufbewahrt werden.

Zum Verpacken beides zusammen in den Transportköcher 2.11.6 stecken.

Leitwertelektrode 2.11.5 in den Transportköcher 2.11.6 stecken.



2.11.4	Ph-Elektrode	1 x
2.11.4.1	Transportschutz mit 3-molarer KCL-Lösung	1 x
2.11.5	Leitwertelektrode	1 x
2.11.6	Transportköcher für Messelektroden	2 x



BESCHÄDIGUNG DER WAAGE!

Transportschutz 2.4.3 und Schutzhaube 2.4.4 auf den Waagengrundkörper 2.4.5 aufsetzen.

Beides festhalten und alles zusammen vorsichtig an der vorgesehenen Position im Transportkoffer unterbringen.




2.4.3	Transportschutz für Messzelle	1 x
2.4.4	Schutzhaube für Waagen-Tastatur	1 x
2.4.5	Grundkörper Kompaktwaaage	1 x



BESCHÄDIGUNG DER PRÜFGEWICHTE!

Die Prüfgewichte 2.5, 2.6, 2.7 in den zugehörigen Leinensäckchen 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1. verpacken.

Prüfgewichte nur mit Handschuhen 2.8 anfassen.

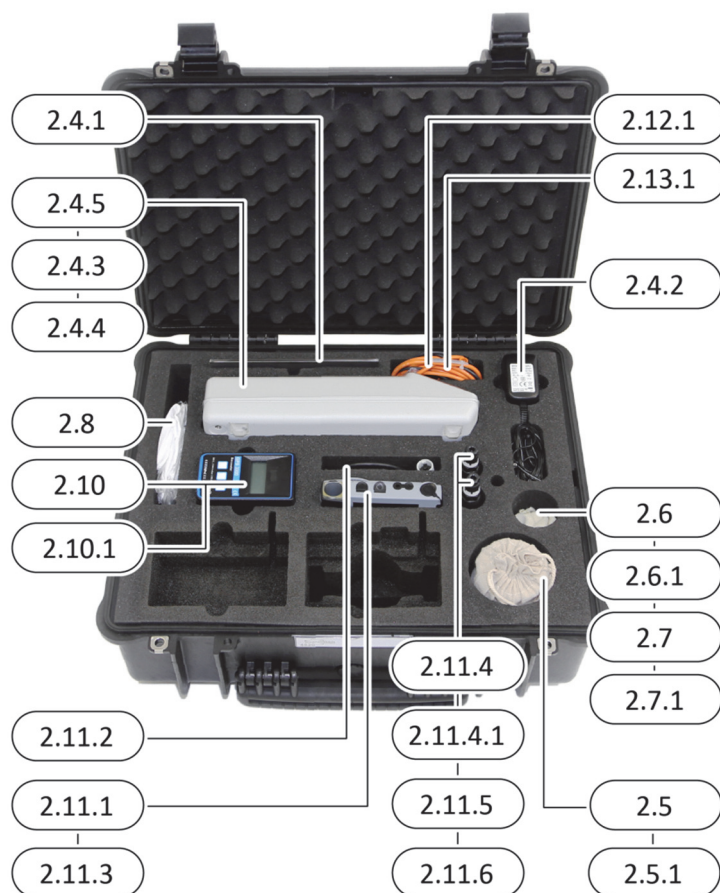

2.4.1	Wägeteller	1 x
2.4.2	Netzteil Waage	1 x
2.4.3	Transportschutz für Messzelle	1 x
2.4.4	Schutzhaube für Waagen-Tastatur	1 x
2.4.5	Grundkörper Kompaktwaage	1 x
2.5	Prüfgewicht Edelstahl, 5.000 g	1 x
2.5.1	Leinen-Säckchen	1 x
2.6	Prüfgewicht Edelstahl, 100 g	1 x
2.6.1	Leinen-Säckchen	1 x
2.7	Prüfgewicht Edelstahl, 10 g	1 x
2.7.1	Leinen-Säckchen	1 x
2.8	Handschuhe (Paar)	3 x
2.10	Taschenbarometer GPB 3300	1 x
2.10.1	Batterie 9 V E-Block	1 x
2.11.1	Knick Portavo 907 MULTI COND	1 x
2.11.2	Universalkabel 1,5 m	1 x
2.11.3	Batterie 1,5 V, Typ AA	4 x
2.11.4	Ph-Elektrode	1 x
2.11.4.1	Transportschutz mit 3-molarer KCL-Lösung	1 x
2.11.5	Leitwertelektrode	1 x
2.11.6	Transportköcher für Messelektroden	2 x
2.12.1	Adapterkabel Temperatur PT 100	1 x
2.13.1	Adapterkabel Druck Binder 710	1 x

	2.9.1	Wasseruhr	1 x
	2.9.2	Schlauch-Verbindung	1 x
	2.9.3	Ersatzdichtungen	1 x

	2.12	Kalibriersimulator PT 100	1 x
	2.13	Kalibriersimulator Drucksensoren 4 - 20 mA	1 x
	2.2	Inhaltslisten laminiert	1 x
	2.3	Packanleitung laminiert	1 x