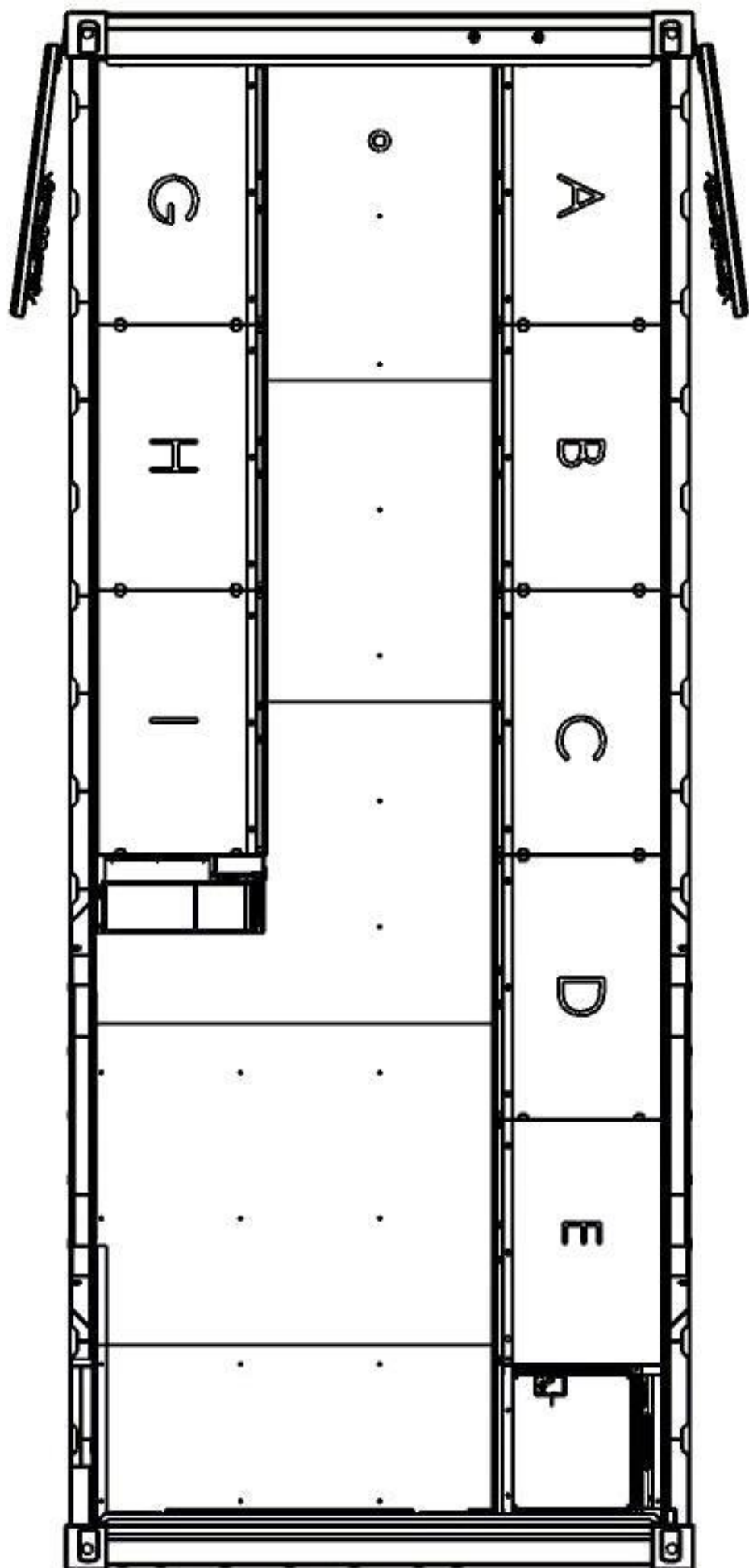


Packanleitung Schränke

Art.-Nr. 606824

Mobile Instrumentenaufbereitung

Sterilisationsmodul EinsLaz 72/180



Inhaltsverzeichnis

1.	Hinweise zum Aus- und Einpacken der Schränke	4
1.1.	Sicherheitshinweise.....	4
1.2.	Die Einlegeböden	4
1.3.	Schrauben und Kleinteile	5
1.4.	Auspacken.....	5
1.5.	Einpacken.....	5
1.5.1.	Bodenauflagen in Schrank E	6
1.6.	Zugänglichkeit für die Wartung von Ausrüstungsgegenständen.....	6
2.	Schrank A	7
3.	Schrank B	16
3.1.	Vorbereiten und Verpacken der Stehhilfen	25
4.	Schrank C	26
5.	Schrank D	32
6.	Schrank E	40
7.	Schrank F.....	44
8.	Schrank G	46
9.	Schrank H	55
10.	Schrank I.....	62
11.	Anbringen der Transportverriegelung.....	67
12.	Wichtige Anschriften	68

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Schrank A gepackt mit Transportverriegelung	7
Abb. 2:	Schrank A gepackt ohne Transportverriegelung	8
Abb. 3:	Schrank A Explosionszeichnung	9
Abb. 4:	Schrank B gepackt mit Transportverriegelung	16
Abb. 5:	Schrank B gepackt ohne Transportverriegelung	17
Abb. 6:	Schrank B Explosionszeichnung	18
Abb. 7:	Schrank C gepackt mit Transportverriegelung.....	26
Abb. 8:	Schrank C gepackt ohne Transportverriegelung.....	27
Abb. 9:	Schrank C Explosionszeichnung	28
Abb. 10:	Schrank D gepackt mit Transportverriegelung	32
Abb. 11:	Schrank D gepackt ohne Transportverriegelung	33
Abb. 12:	Schrank D Explosionszeichnung	34
Abb. 13:	Schrank E gepackt ohne Transportverriegelung	41
Abb. 14:	Schrank E Explosionszeichnung	42
Abb. 15:	Schrank F Transportzustand und Betriebszustand	44
Abb. 16:	Schrank G gepackt mit Transportverriegelung.....	46
Abb. 17:	Schrank G gepackt ohne Transportverriegelung	47
Abb. 18:	Schrank G Explosionszeichnung.....	48
Abb. 19:	Schrank H gepackt mit Transportverriegelung	55
Abb. 20:	Schrank H gepackt ohne Transportverriegelung	56
Abb. 21:	Schrank H Explosionszeichnung.....	57
Abb. 22:	Schrank I gepackt mit Transportverriegelung	62
Abb. 23:	Schrank I gepackt ohne Transportverriegelung	63
Abb. 24:	Schrank I Explosionszeichnung	64

1. Hinweise zum Aus- und Einpacken der Schränke

Die Schränke im Container Lagerung Sterilgut erfüllen eine Doppelfunktion:

- Im Betrieb zur Lagerung von Sterilgut
- Im Transportzustand zum sicheren Transport von Ausrüstungsgegenständen und Geräten.

1.1. Sicherheitshinweise

Diese Packanleitung ist Bestandteil der Betriebsanleitung Sterilgut-Lagercontainer. Alle dort aufgeführten allgemeinen Hinweise und Symbolerklärungen gelten auch für diese Packanleitung.



ACHTUNG!

Zur Montage der Einlegeböden sind zwei Personen erforderlich. Bei Nichtbeachtung können die Schrankwände beschädigt und Personal verletzt werden.

Setzen Sie die Einlegeböden vorsichtig ein, um ein Verkratzen der inneren Schrankwände zu vermeiden.



GEFAHR!

Verletzungsgefahr an den Kanten der Blechteile. Beim Hantieren mit den Einlegeböden Schutzhandschuhe tragen.

1.2. Die Einlegeböden

Schrank lichte Weite	Einlegeböden			
	Betrieb	Transport senkrecht	Transport waagrecht	verpackt
A 1030	4	3		
B 1030	4	3		
C 1030	4	3		
D 1030	4	3		
E 950	4	3	2	
F	---	---	---	
G 1030	4	3		
H 1030	4	3		
I 1030	4	3	2	6

Zu jedem Schrank gehören im Betrieb als Sterilgutlager 4 Einlegeböden.

Beim Transport werden 2 oder 3 dieser Einlegeböden als Transportverriegelung senkrecht vor der Schranköffnung mit der glatten Fläche nach innen **montiert**.

Nur in den Schränken E und I bleiben beim Transport die beiden oberen Einlegeböden waagrecht montiert.

1.3. Schrauben und Kleinteile

Alle Schrauben und Kleinteile, die aus einem Schrank entfernt werden oder für einen Schrank bestimmt sind, müssen immer in der Kleinteilebox 1 Sterilgut-Lagerschränke (Art. Nr. 605651) aufbewahrt werden. Bei der Montage von Einlegeböden sind die Kleinteile dieser Box zu entnehmen.

1.4. Auspacken

Diese Packanleitung zeigt die Schränke in der Reihenfolge des Auspackens. Die **erste Abbildung** jedes Schrankes zeigt nach dem Öffnen der Türen die als Transportverriegelung angebrachten Einlegeböden.

Jeder Einlegeboden ist sowohl im Betrieb als auch im Transportzustand mit 4 Schrauben seitlich an der Wand befestigt. Es müssen alle 4 Schrauben entfernt werden, sonst Beschädigung der Schaumteile.

Die **zweite Abbildung** zeigt die Schränke nach Abnehmen der Transportverriegelung. Alle Packeinheiten können nun entnommen werden.

Beim Auspacken verbleiben die abgenommenen Einlegeböden in den ansonsten leeren Schränken. Der Aufbau der Regale in den Schränken ist im letzten Kapitel dieser Anleitung beschrieben.

Die Schaumteile sind aus den Schränken zu entfernen und nach „Anleitung Zwischenlagerung Frachtcontainer“ im Frachtcontainer zu lagern. Ebenso Spanngurte und Klettbänder.

1.5. Einpacken

Vorbereitende Arbeiten:

- ◆ Entnehmen Sie die Einlegeböden aus den Schränken (Ausnahmen Schrank E und I)
- ◆ Entfernen Sie alle vorstehenden Schrauben aus den Schrankwänden, da sonst die Schaumteile beschädigt werden können.
- ◆ Legen Sie die Schrauben in der „Kleinteilebox 1 Sterilgutlagerschränke“ (transportiert in Schaumteil A15) ab.
- ◆ Entfernen Sie in Schrank I 2 Lochabdeckungen im Seitenteil des Schrankes und lagern Sie diese in der Kleinteilebox 1.
- ◆ Reinigen Sie Schränke und Einlegeböden und desinfizieren Sie die Oberflächen.
- ◆ Reinigen Sie die Ausrüstungsgegenstände und desinfizieren Sie die Oberflächen.
- ◆ Stellen Sie Ausrüstungsgegenstände und Verpackungsmaterial gemäß Inhaltsliste schrankweise zusammen und prüfen diese auf Vollständigkeit.



HINWEIS

Die „Inhaltsliste Schränke Sterilgut-Lagercontainer“ enthält zu vielen Artikeln Einzelpositionen und verlierbare Teile, die in der Packanleitung nicht explizit genannt sind. Diese sind zusammen mit dem jeweiligen Artikel gemäß Inhaltslisten zu verpacken. Die Inhaltslisten beschreiben den Transportzustand in den gepackten Schränken.

Beim Einpacken sind zunächst die einzelnen Packeinheiten zu erstellen. Dies geschieht, indem man das in der linken Spalte gezeigte Verpackungsmaterial mit dem in der mittleren Spalte gezeigten bzw. genannten bzw. nach Inhaltsliste zusammenzustellenden Inhalt füllt. So entsteht die in der rechten Spalte gezeigte Verpackungseinheit.

Die Platzierung der Packeinheiten im Schrank erfolgt nach der Darstellung in der Explosionszeichnung und der Abbildung „Schränk gepackt ohne Transportverriegelung“

Als letzte Arbeitsschritte werden die Transportverriegelungen angebracht und die Schranktüren verschlossen. Diese Arbeitsschritte sind im Kapitel 11 dieser Anleitung beschrieben.

Die Auflösung des Zwischenlagers Frachtcontainer erfolgt gemäß „Abbauanleitung Gesamtsystem - Auflösung des Zwischenlagers Frachtcontainer“

1.5.1. Bodenauflagen in Schrank E

Im Schrank E befinden sich 2 Bodenauflagen E1. Diese dienen als Trägerplatten zum Einsetzen und Herausnehmen der gepackten Schaumkisten.

1.6. Zugänglichkeit für die Wartung von Ausrüstungsgegenständen

Ausrüstungsgegenstände, welche regelmäßiger Wartung oder Kalibrierung oder einer Überprüfung nach DGUV, Vorschrift 3 bedürfen und Verbrauchsmaterial mit eingeschränktem Haltbarkeitsdatum befinden sich in den beim Öffnen des Sterilgut-Lagercontainers als Erstes zugänglichen Schränken A und G.

2. Schrank A

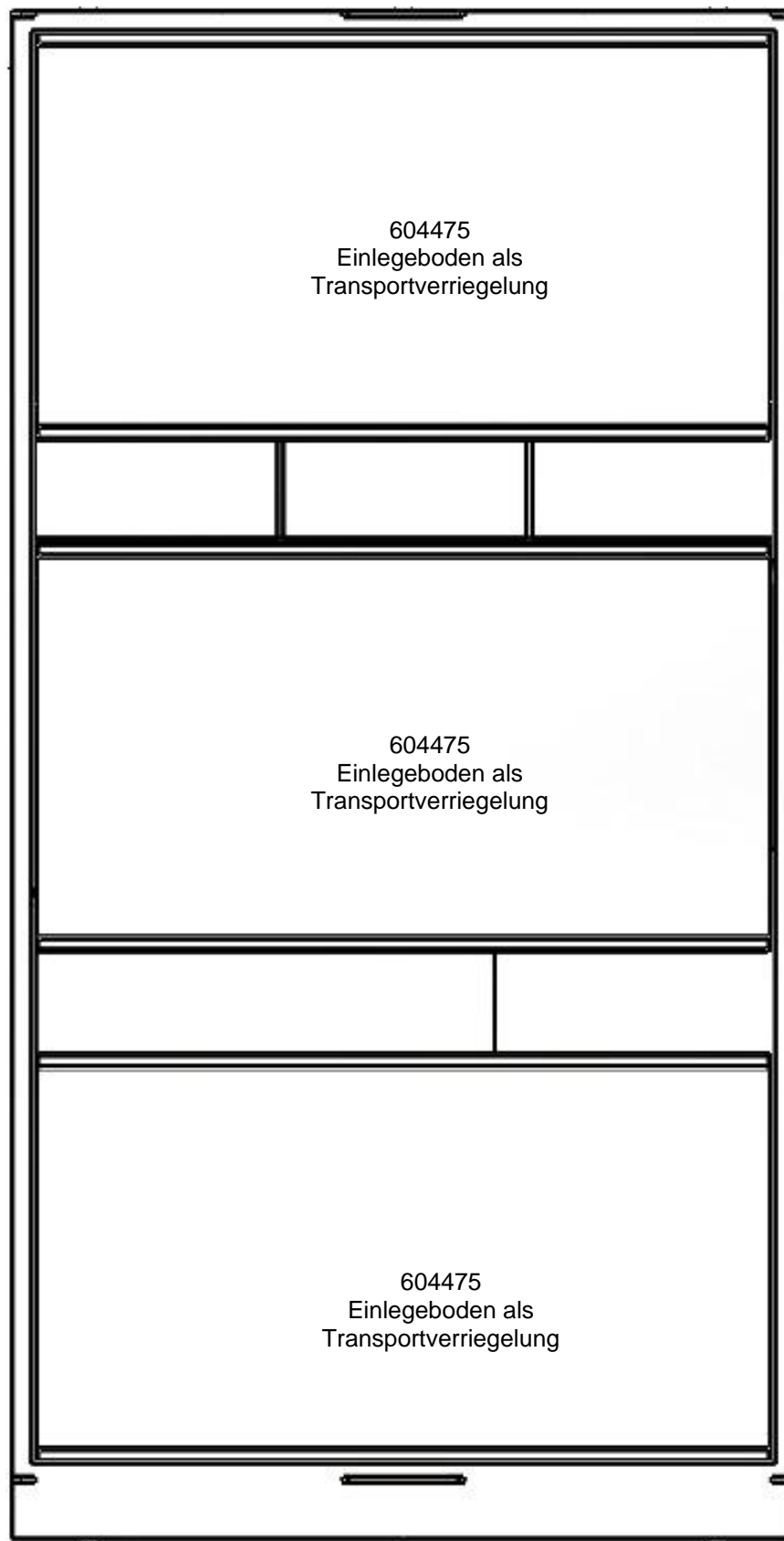


Abb. 1: Schrank A gepackt mit Transportverriegelung

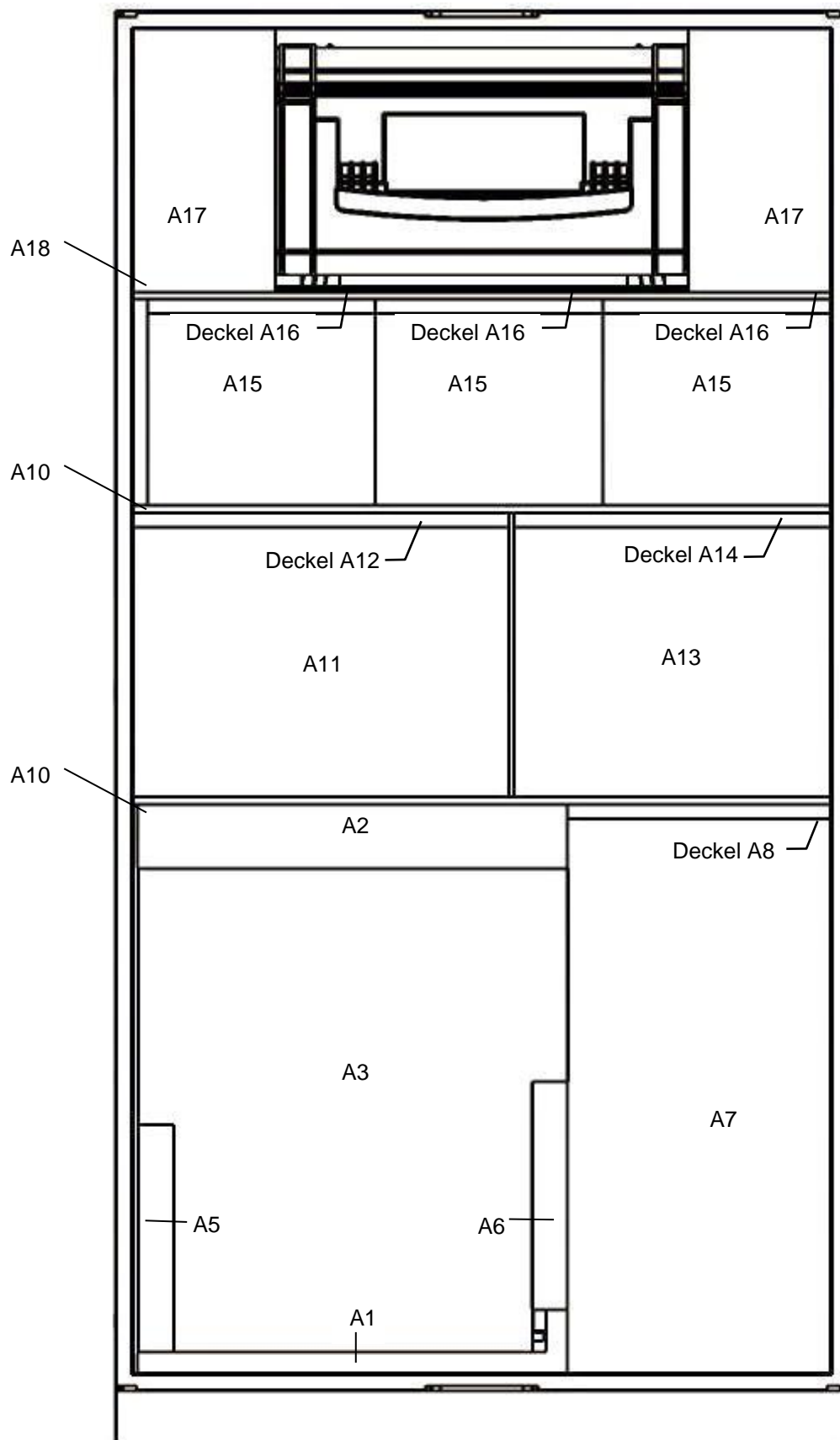


Abb. 2: Schrank A gepackt ohne Transportverriegelung

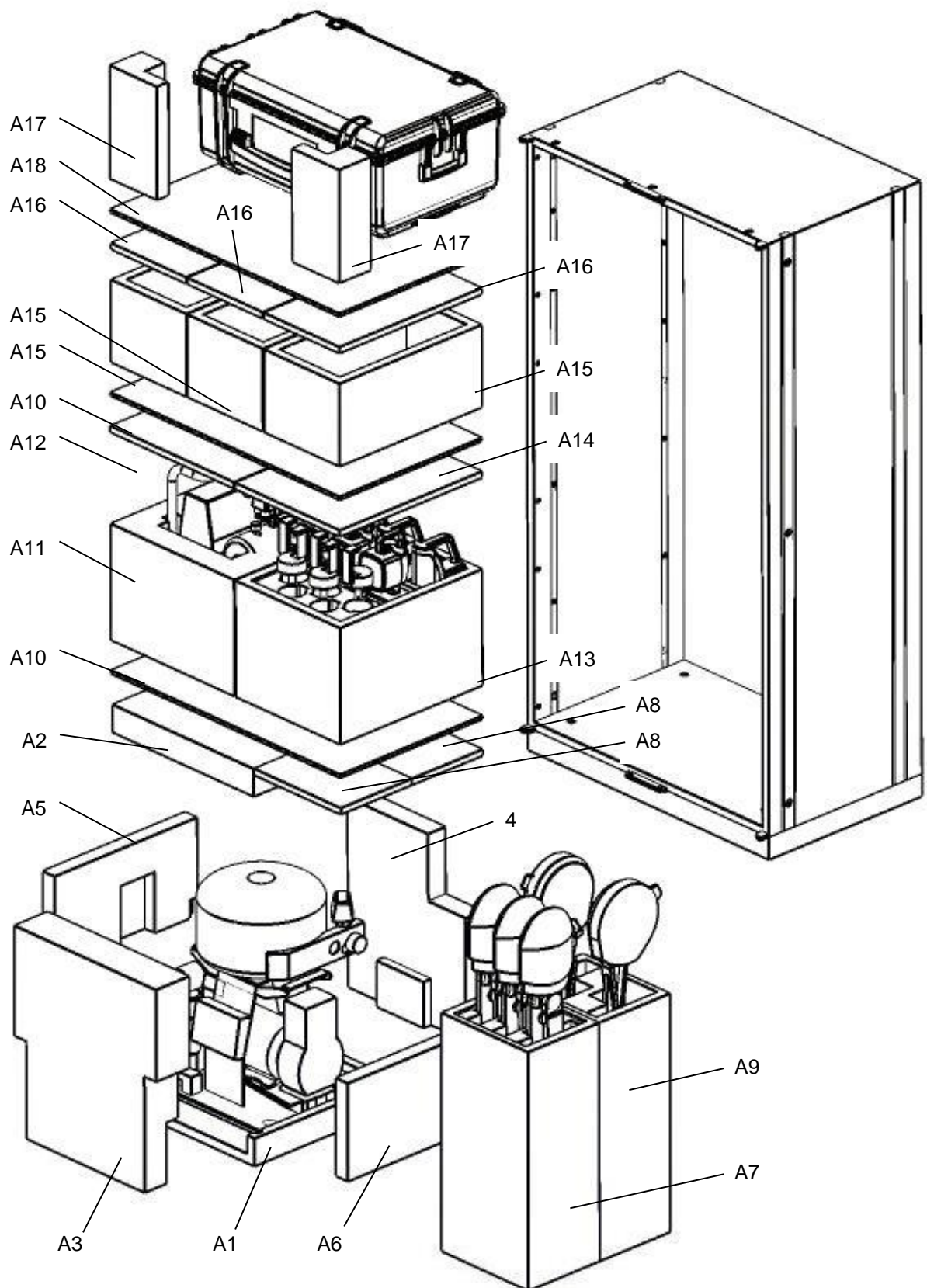
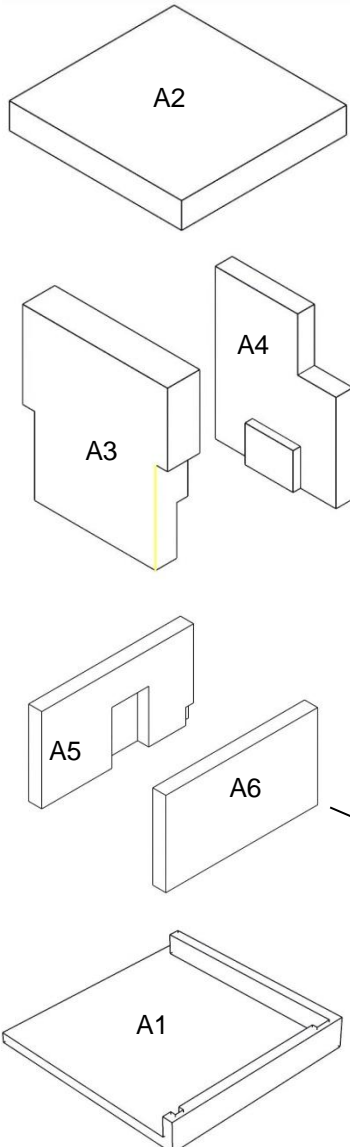

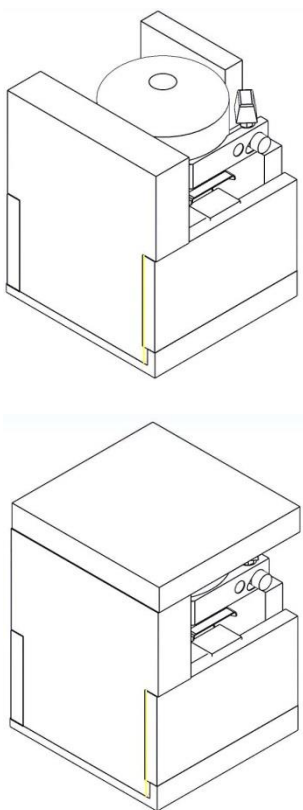
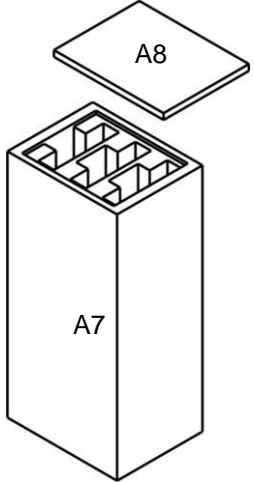

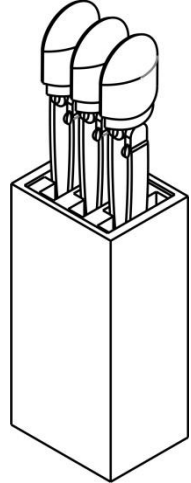
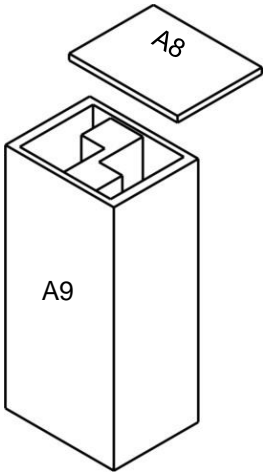

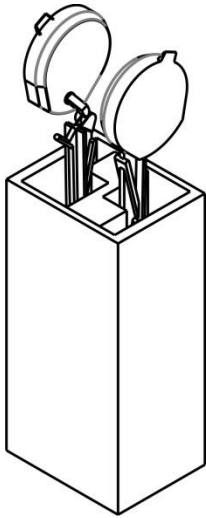
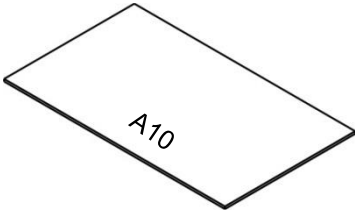
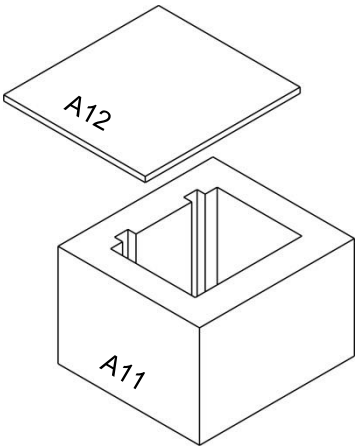

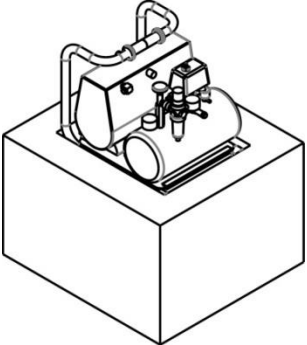
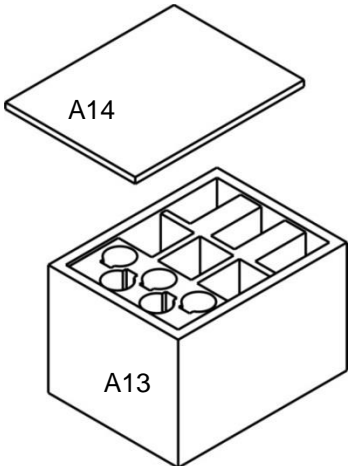

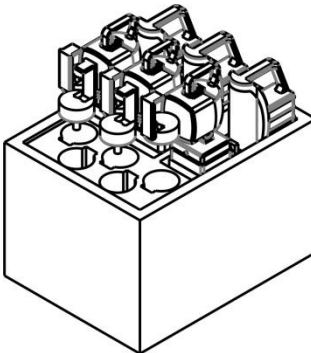
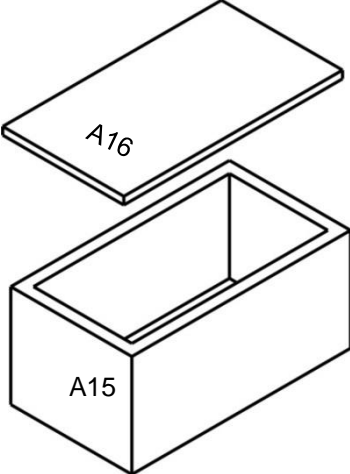


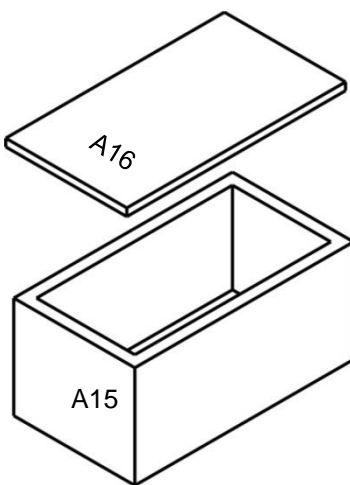



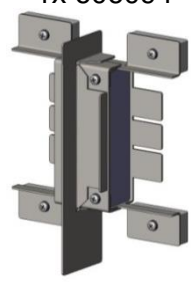



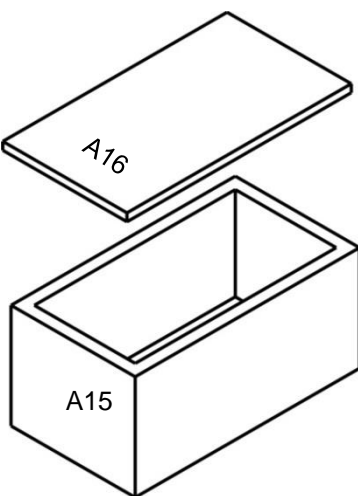








Abb. 3: Schrank A Explosionszeichnung



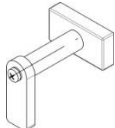

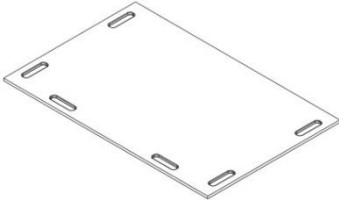
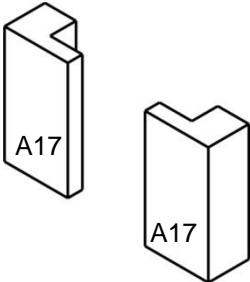


Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>A2</p> <p>A3</p> <p>A4</p> <p>A5</p> <p>A6</p> <p>A1</p>	 <p>609663 + 609940</p> <p>606275-A2 609813-A3 609811-A4 609812-A5 609814-A6 604567-A1</p>	
 <p>A8</p> <p>A7</p> <p>604554-A8 604556-A7</p>	 <p>3x 600750</p>	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>A8 A9</p> <p>604554-A8 604555-A9</p>	 <p>2x 600579</p>	
 <p>A10</p> <p>2x 604439-A10</p>	<p>Zwischenboden Schrank A</p>	<p>---</p>
 <p>A12 A11</p> <p>604536-A12 604535-A11</p>	 <p>605661 605665 606040 604110 605665</p>	 <p>Druckluftanlage + Zubehör laut Inhaltsliste</p>

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>604552-A14 604551-A13</p>	 <p>3x 600378 3x 600537 5x 600013 2x 600460</p>	
 <p>links 604545-A16 604544-A15</p>	 <p>604807 605607 605605</p>	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>A16</p> <p>A15</p> <p>mittig</p> <p>604545-A16 604544-A15</p>	 <p>605606</p>  <p>60x 605509</p>  <p>7x 605508</p> <p>3x 606719 1x 606094</p>  <p>1x 605515</p>	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>rechts</p> <p>604545-A16 604544-A15</p>	 <p>605615 + 605616</p>	
	 <p>605135</p>	
	 <p>6x 605686</p>	
	 <p>605619</p>	
	 <p>606065</p>	
	 <p>601842</p>	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
	 4x 606071  605608  4x 606565  605651	
	Bodenaufgabe A18	---
 2x 604550-A17	 606821	

3. Schrank B

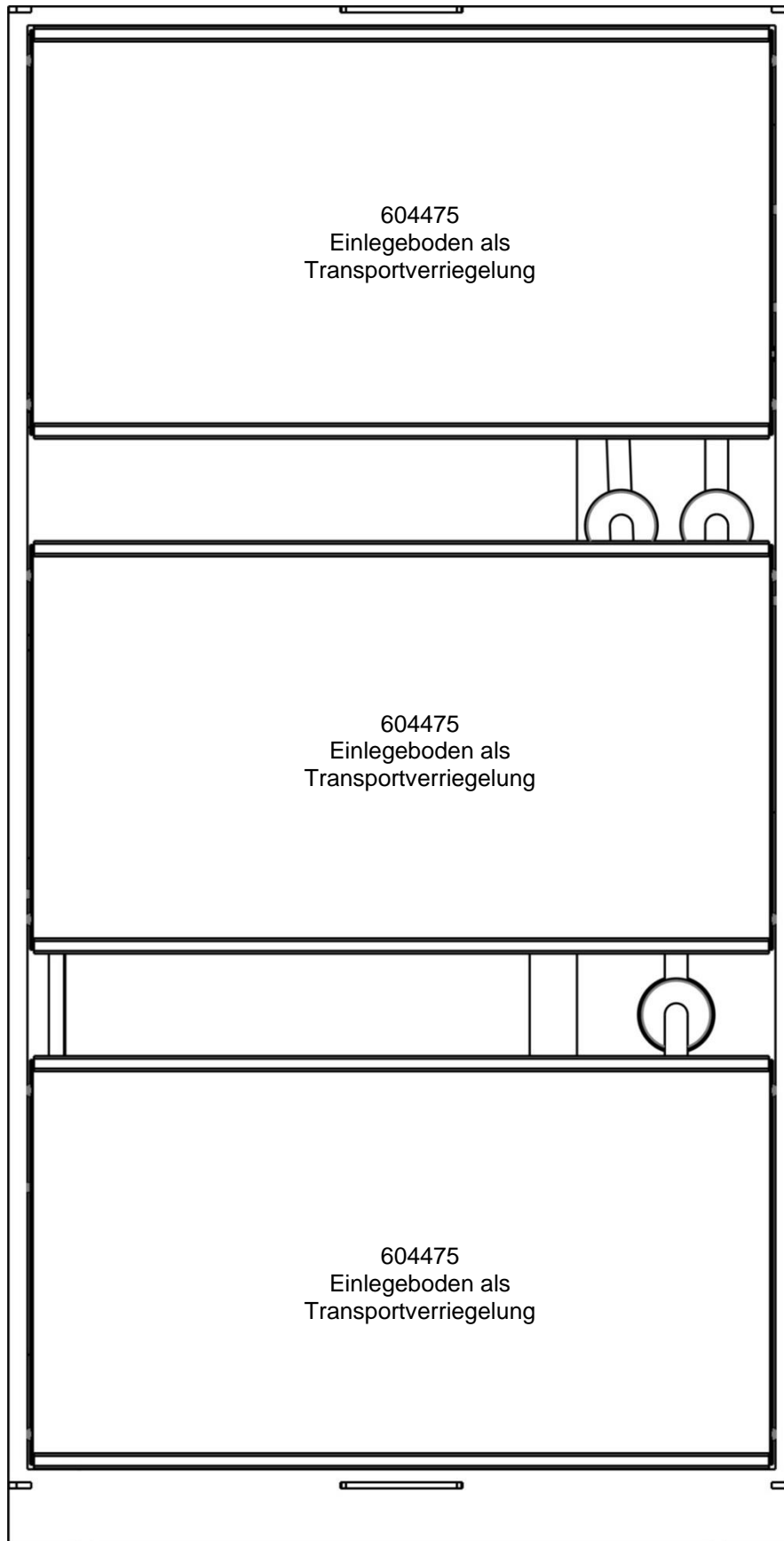


Abb. 4: Schrank B gepackt mit Transportverriegelung

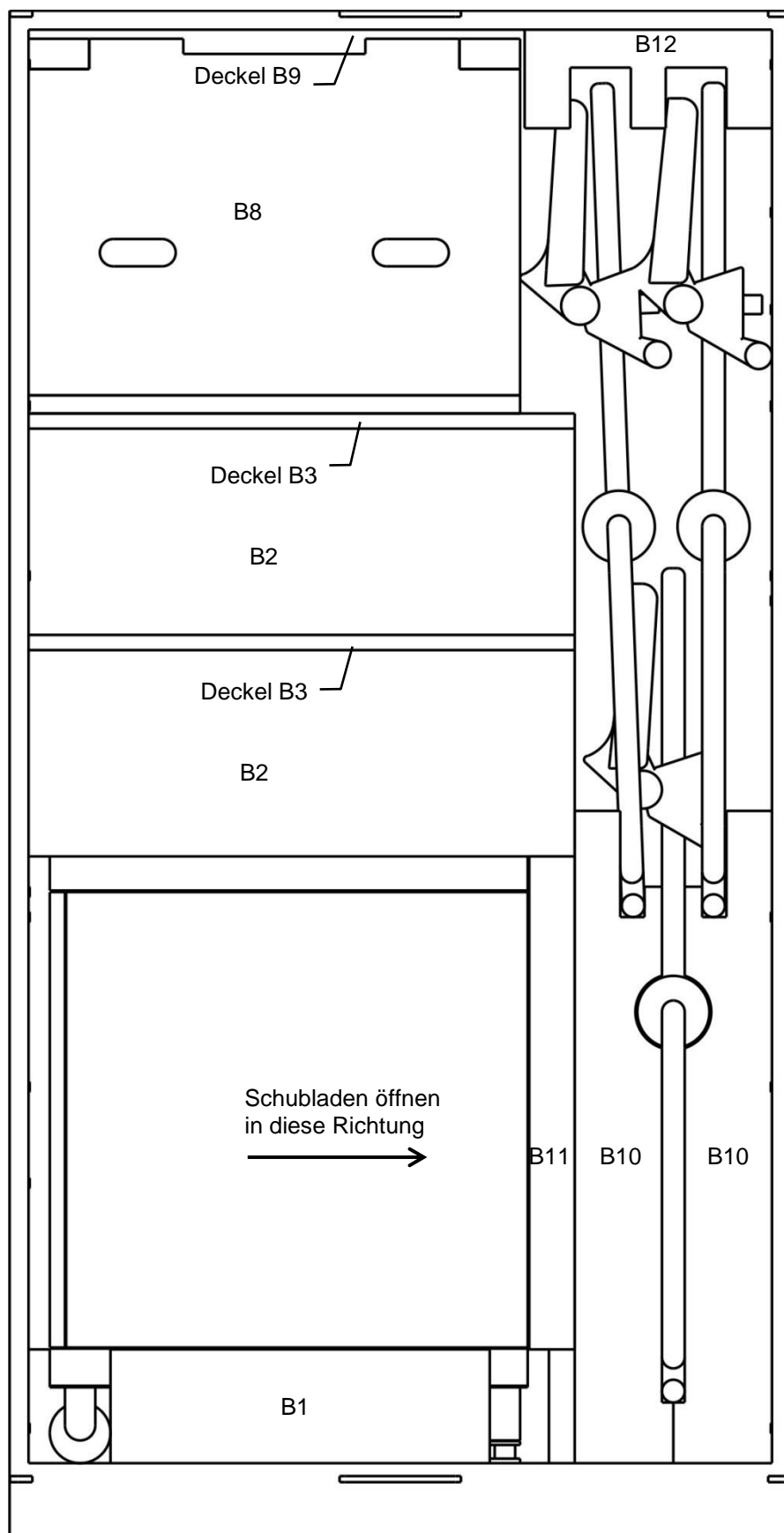


Abb. 5: Schrank B gepackt ohne Transportverriegelung

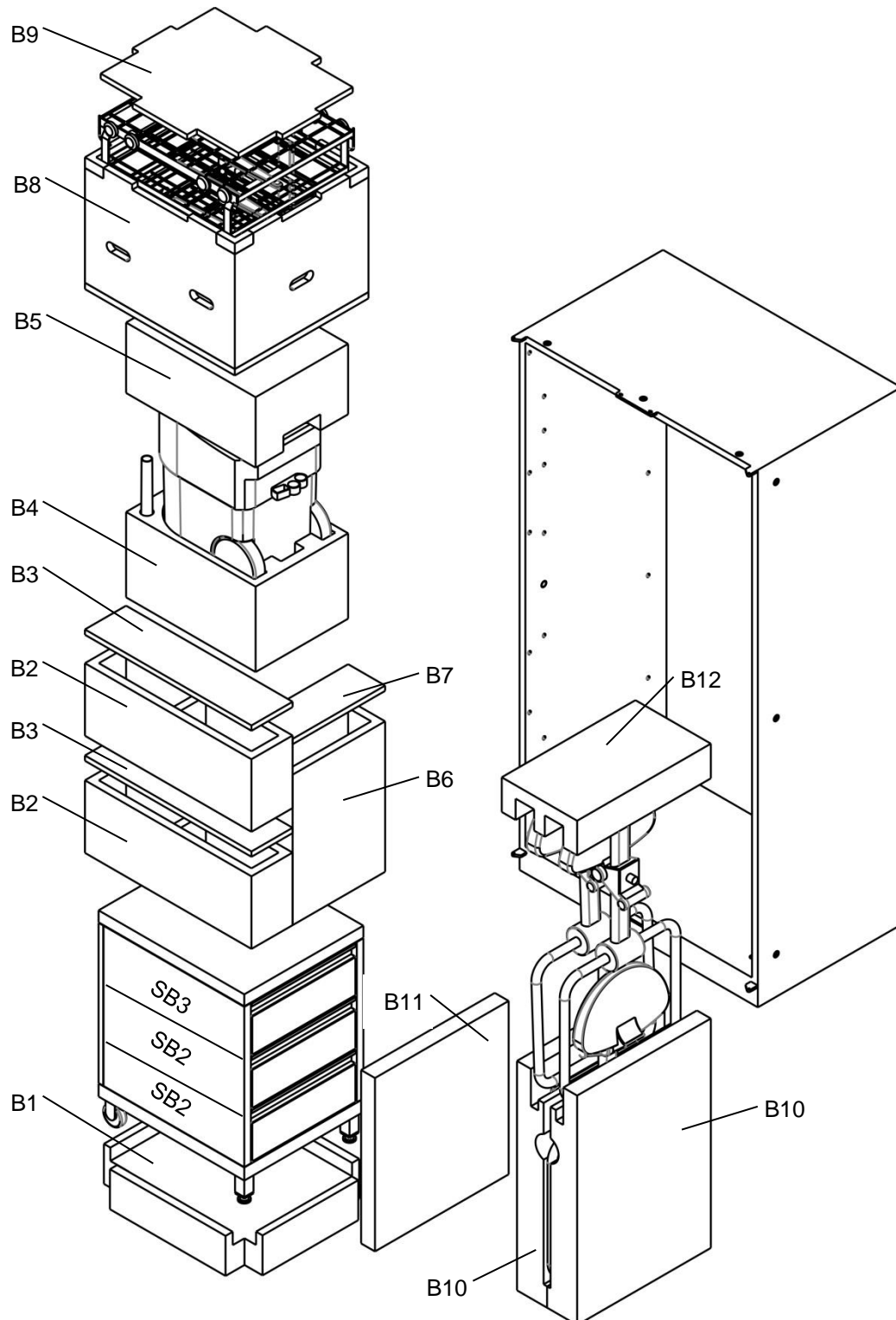
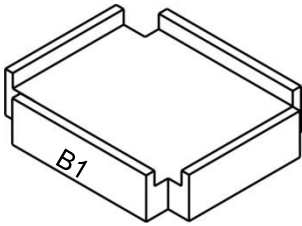

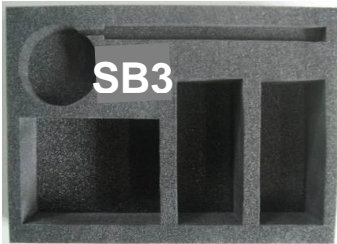
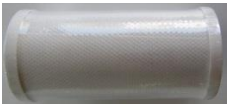








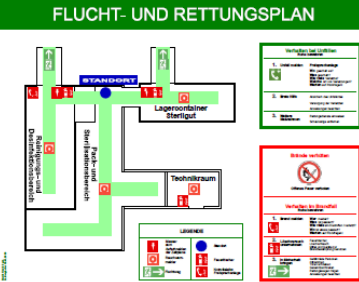





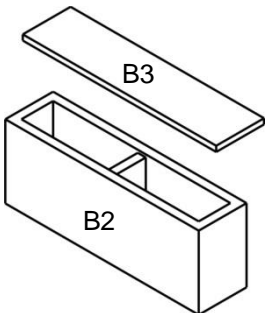

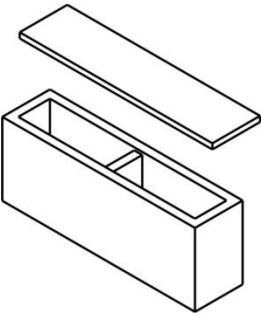



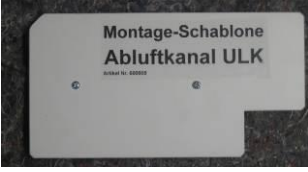

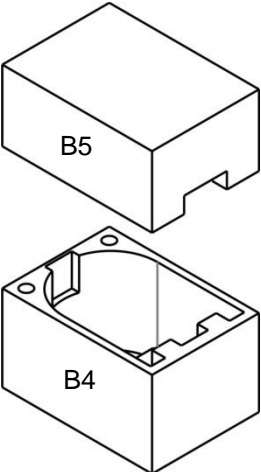

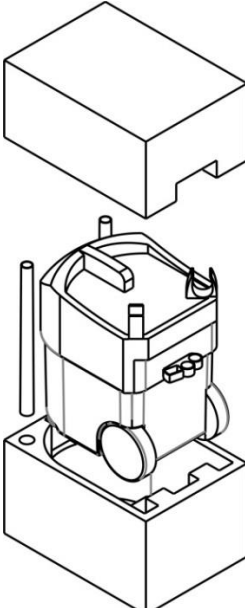


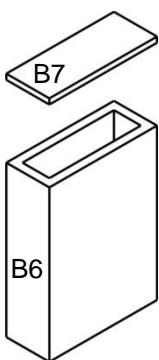
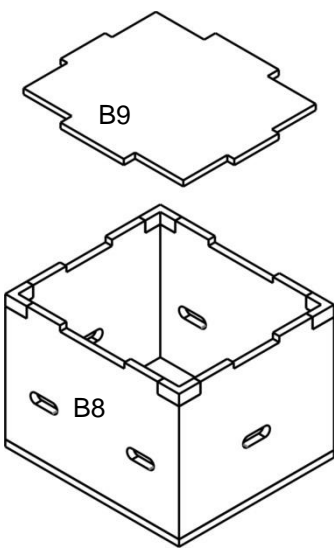

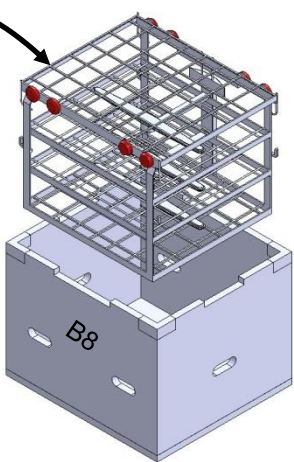
Abb. 6: Schrank B Explosionszeichnung

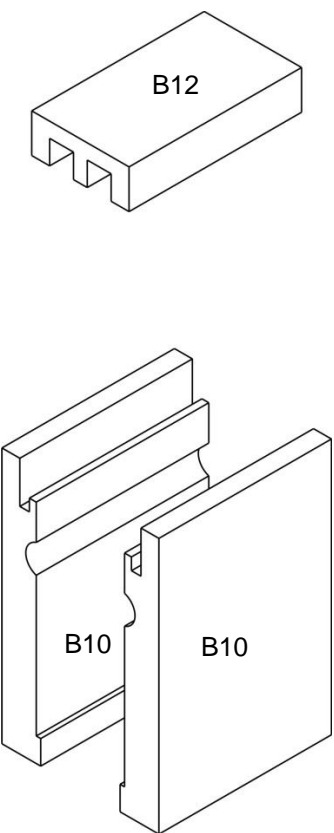

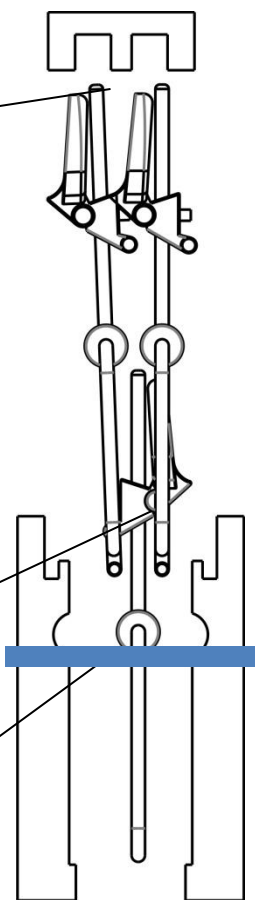
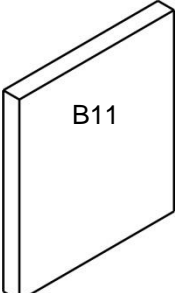
Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 604594-B1	 Schubladenblock unreiner Bereich	
 606073-SB3	 609685  609686  6x 600799  4x 601038  10x 600251  601723  600756	obere Schublade

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>606074-SB2</p>	 <p>600394</p>  <p>604431</p>  <p>6x 601045</p>  <p>Zugang nur für Berechtigte 2x 601093</p>  <p>604102</p>	<p>mittlere Schublade</p>

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>606074-SB2</p>	 <p>601724</p>  <p>600016 600017</p>  <p>601347</p>  <p>4x 600757</p>  <p>600494</p>	<p>untere Schublade</p>
 <p>604574-B3 604247-B2</p>	 <p>Staubsauger: Saugdüse und Zubehör</p>	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>604574-B3 604247-B2</p>	 <p>3x 600413</p>  <p>3x 600276 3x 601050</p>  <p>3x 600736</p>  <p>Montage-Schablone Abluftkanal ULK Artikel Nr. 600808</p> <p>600808</p>	
 <p>B5 B4</p> <p>604578-B5 604549-B4</p>	 <p>605137</p> <p>2x Saugrohr</p>	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>604575-B7 604246-B6</p>	<p>Zubehör Nass- und Trockensauger</p>	
 <p>604214-B9 604521-B8</p>	 <p>1x 600339 Räder nach oben + nach vorne/hinten</p>	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>B12</p> <p>B10 B10</p> <p>604593-B12 604573-B10</p>	<p>Vorbereiten und Verpacken der Stehhilfen“ siehe Seite 25</p> <p>Sitze oben bündig</p>  <p>3x 600459 Sitz in tiefster Position</p> <p>600067 Ratschenspanngurt 25 mm, 3,5 m</p>	
 <p>B11</p> <p>604613-B11</p>	<p>Füllstück</p>	<p>---</p>

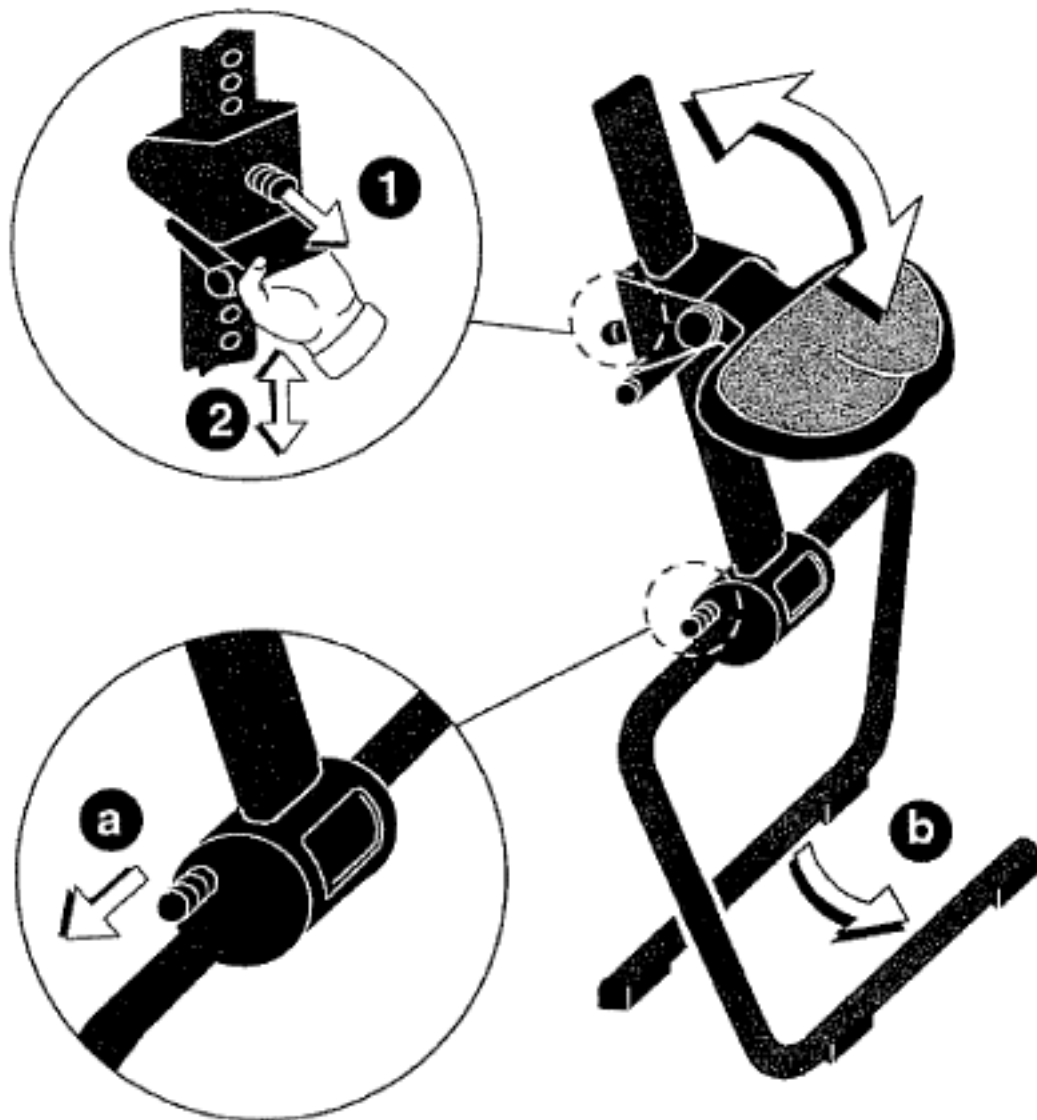
3.1. Vorbereiten und Verpacken der Stehhilfen

Sitz der Stehhilfe, die unten verpackt wird, in der tiefsten Position einrasten (Pos. 1 und 2).

Sitz der beiden Stehhilfen, die oben verpackt werden, so einrasten, dass der hochgeklappte Sitz bündig zur Rückenlehne ist.

Sitzflächen hochklappen.

Füße parallel stellen (Pos. a und b).



Untere Stehhilfe und die beiden Schaumteile B10 mit Spanngurt 3,5 m zusammenspannen und einschieben in Schrank B.

Die beiden oberen Stehhilfen einzeln im Schrank B positionieren, oben mit Schaumteil B12 fixieren.

4. Schrank C

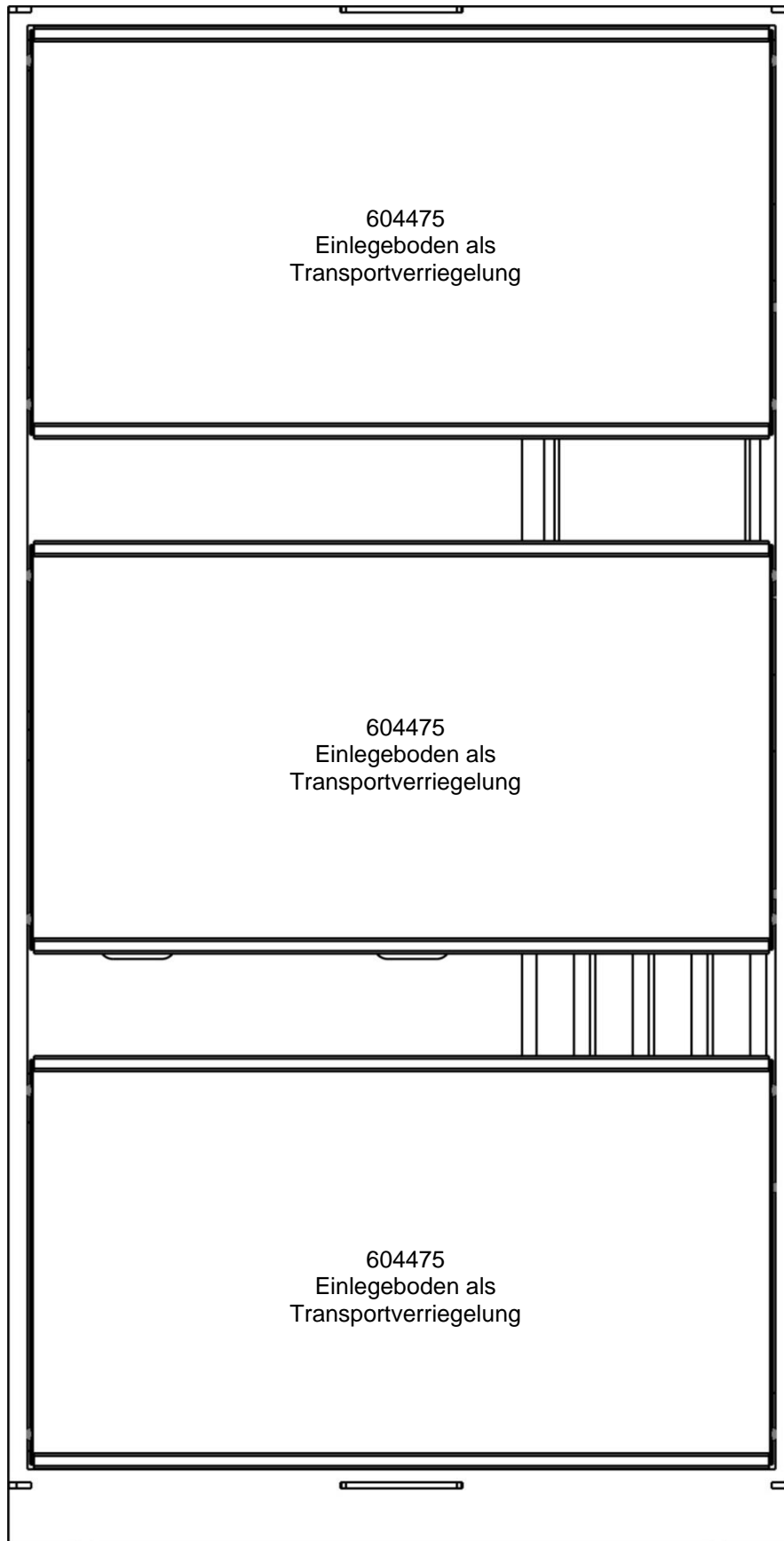


Abb. 7: Schrank C gepackt mit Transportverriegelung

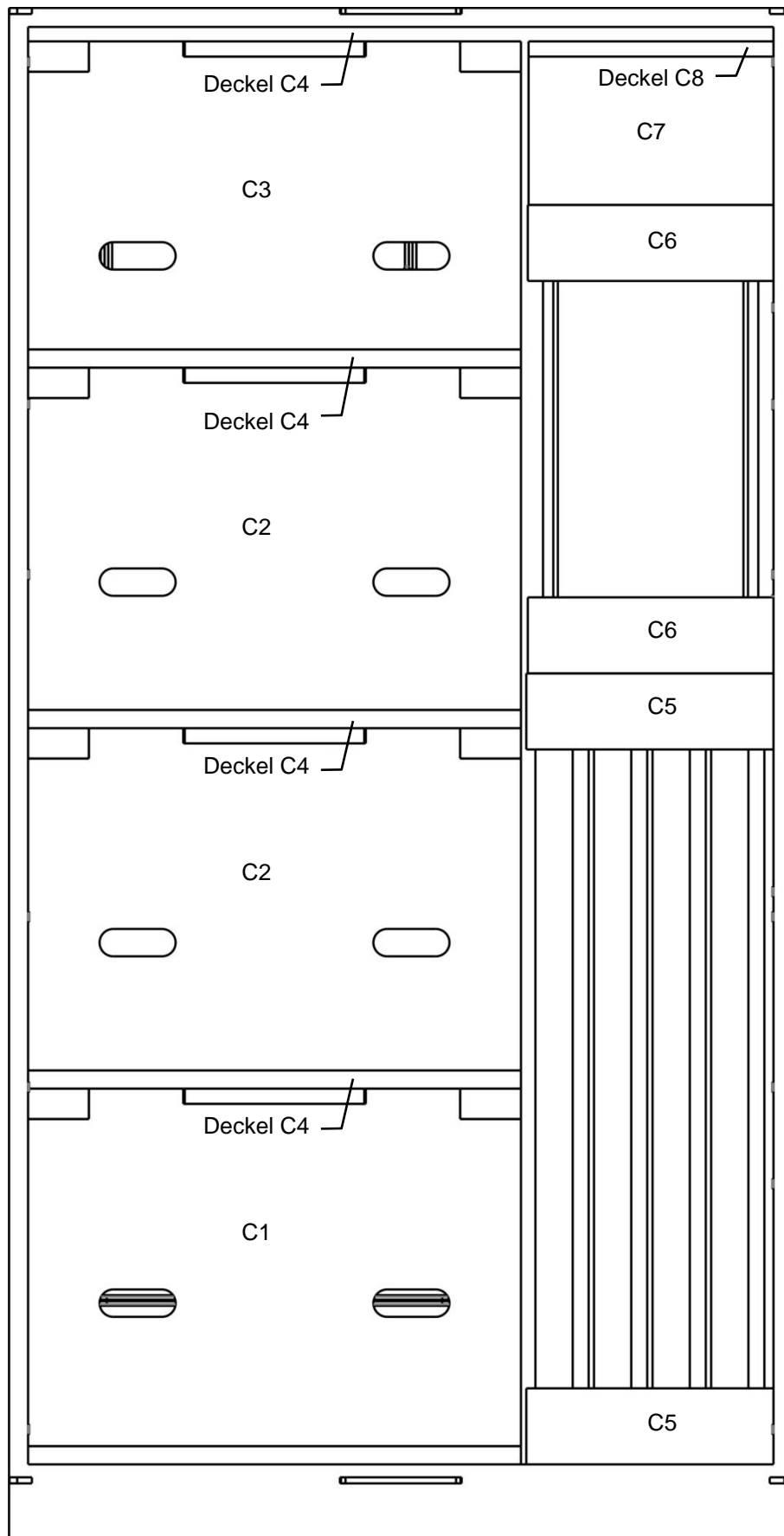


Abb. 8: Schrank C gepackt ohne Transportverriegelung

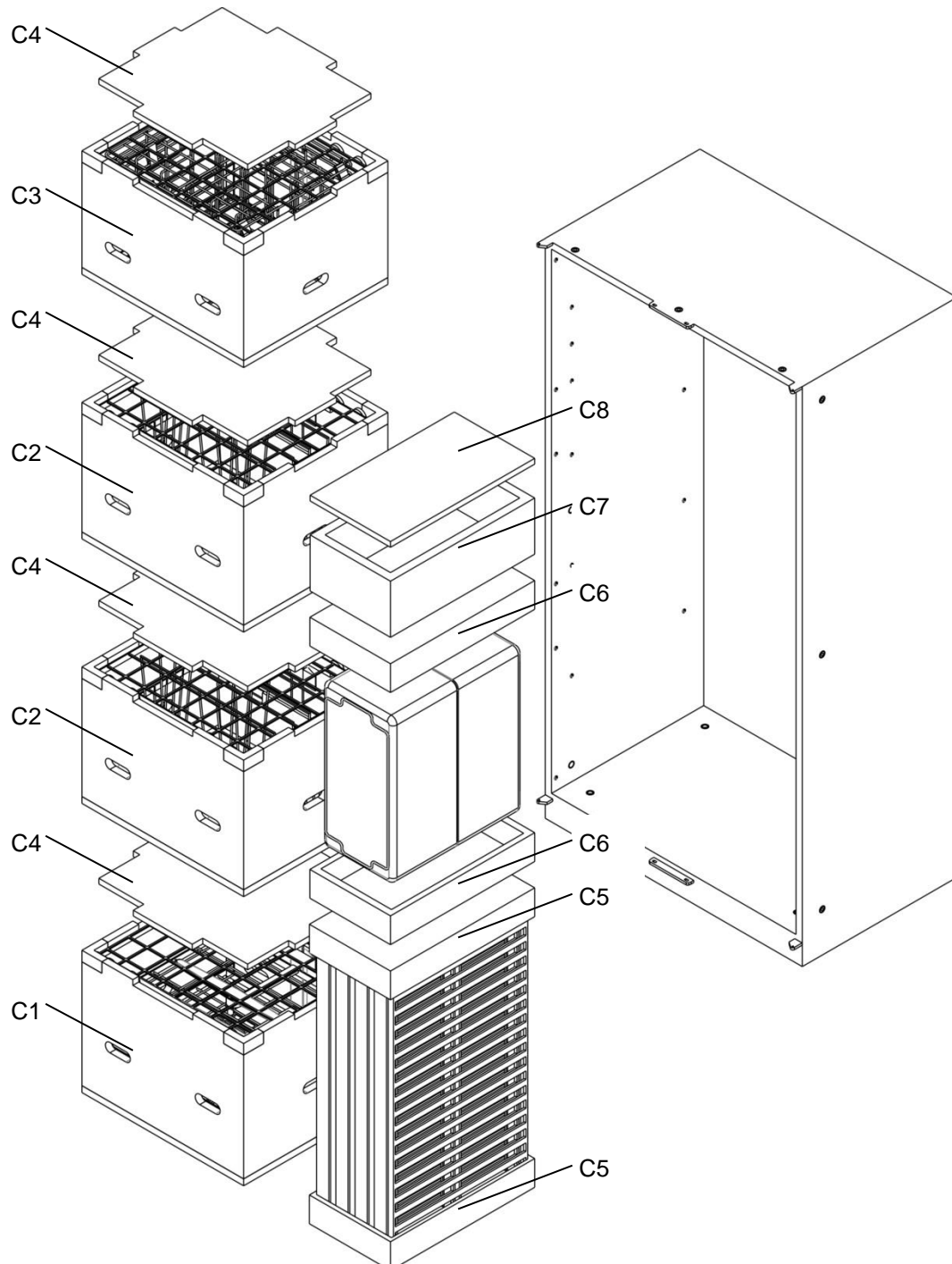
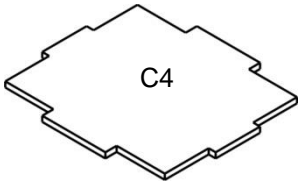
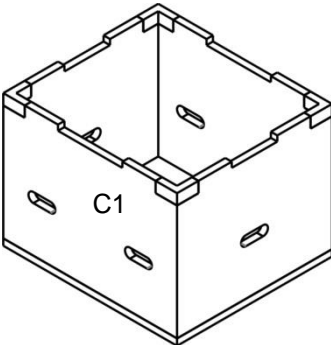

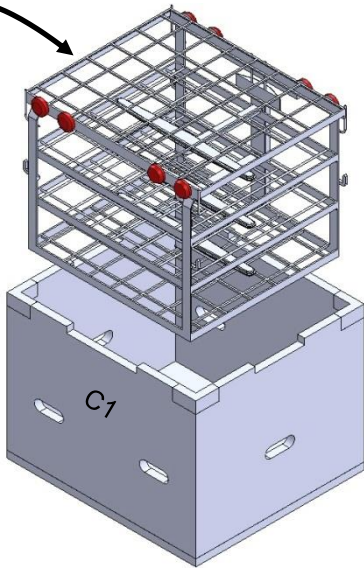
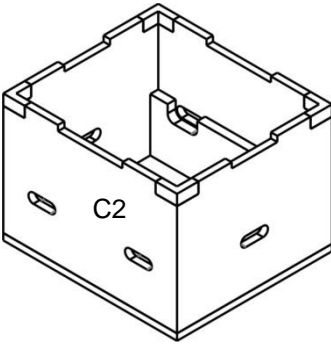

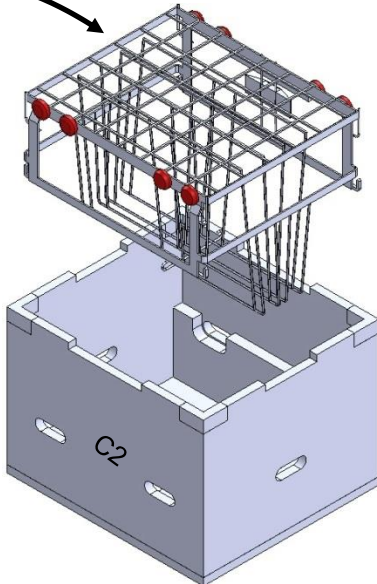
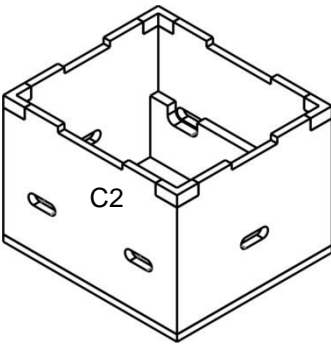

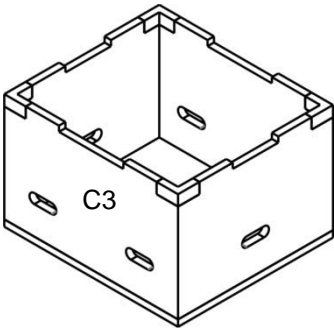
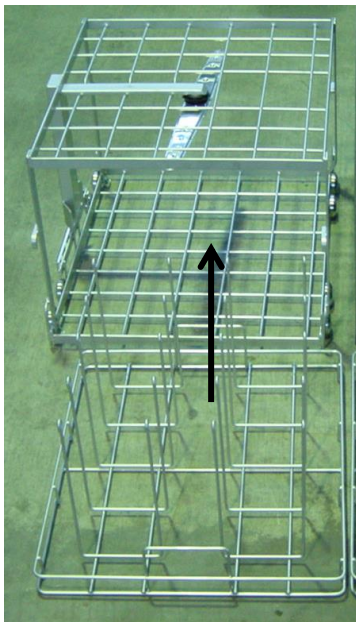
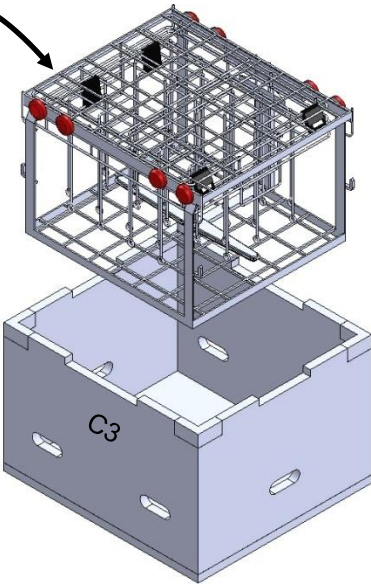
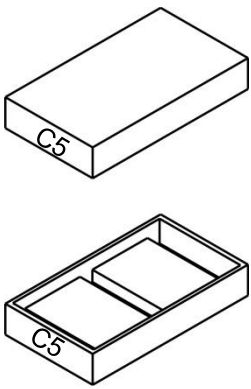


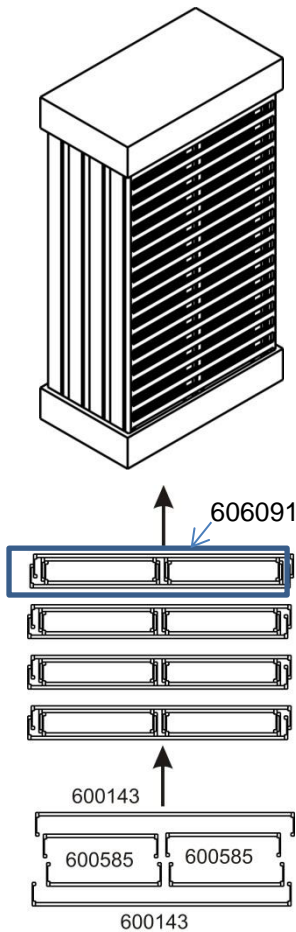
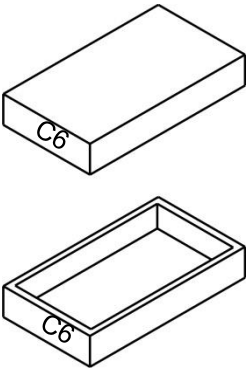

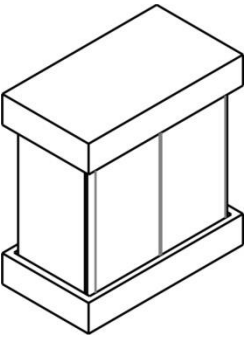
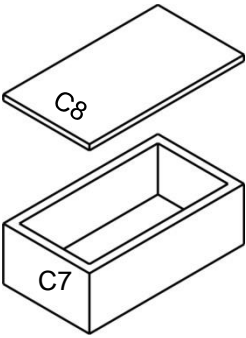


Abb. 9: Schrank C Explosionszeichnung

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>C4</p> <p>4x 604214-C4 für C1, C2, C2, C3</p>		
 <p>C1</p> <p>604521-C1</p>	 <p>1x 600339 Räder nach oben + nach vorne/hinten</p>	 <p>C1</p>
 <p>C2</p> <p>604522-C2</p>	 <p>1x 600338 Räder nach oben + nach vorne/hinten</p>	 <p>C2</p>
 <p>C2</p> <p>604522-C2</p>	 <p>1x 600338 Räder nach oben + nach vorne/hinten</p>	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>604523-C3</p>	<p>1x 600336, dazwischen 2x 600337</p>  <p>4x 603039</p>	 <p>Die beiden Einsätze für OP-Schuhe ineinanderstellen, in den Wagen schieben, mit 4 Klettbindern befestigen, dann Wagen mit den Rädern nach oben in die Schaumstoffschachtel packen.</p>
 <p>2x 604467-C5</p>	 <p>16x 600585</p> <p>4x 606091 Klettband</p>  <p>8x 600143</p>	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 2x 604452-C6	 2x 600148	
 604547-C8 604546-C7	Systemvalidierungsbericht MSE Gesamtsystem Systemvalidierungsbericht MSE RDG's Systemvalidierungsbericht MSE 65 TC Systemvalidierungsbericht EL ECO 300 HC	

5. Schrank D

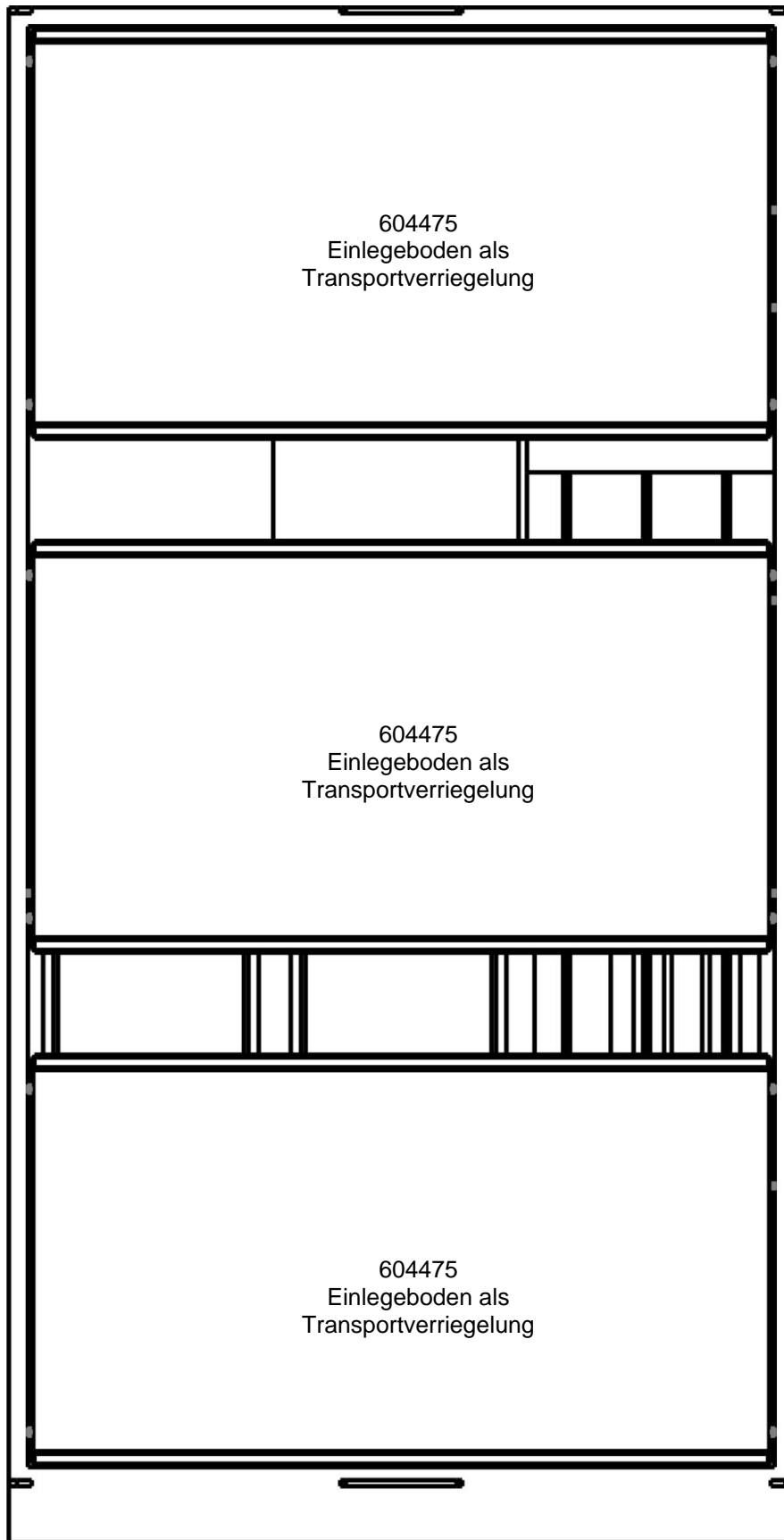


Abb. 10: Schrank D gepackt mit Transportverriegelung

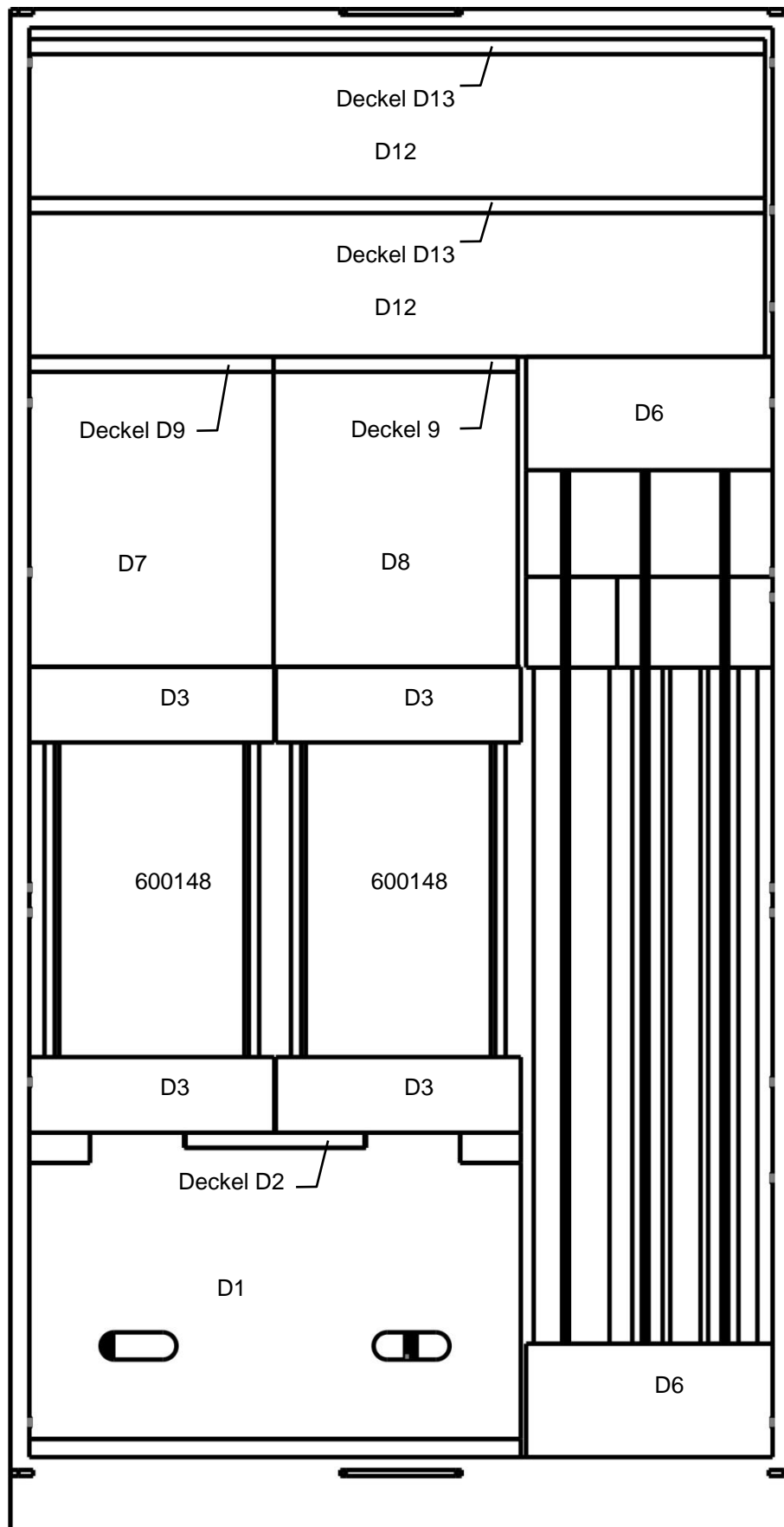


Abb. 11: Schrank D gepackt ohne Transportverriegelung

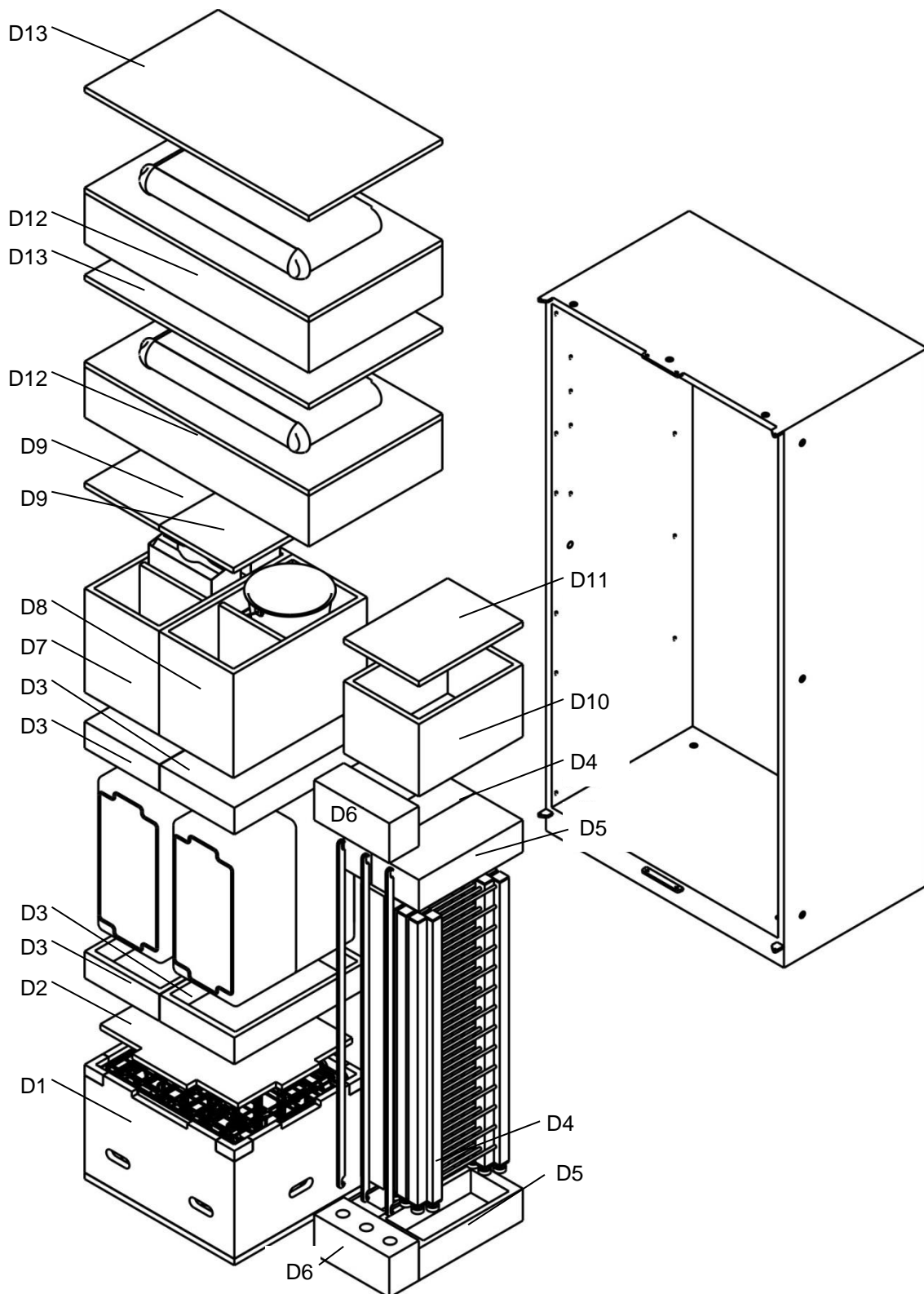
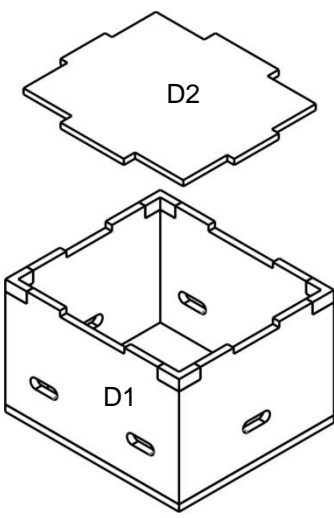

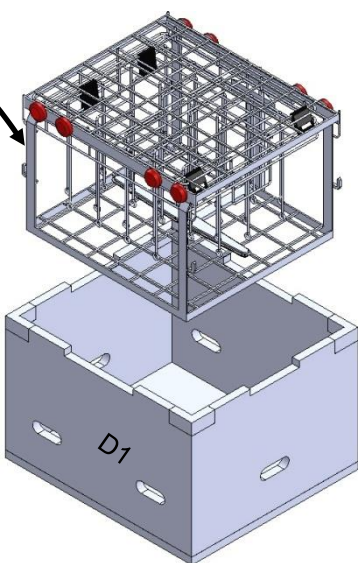
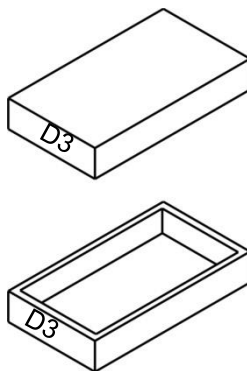

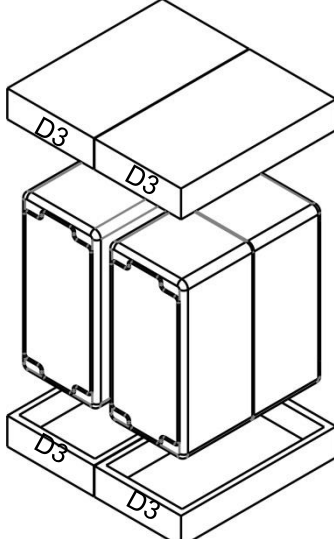
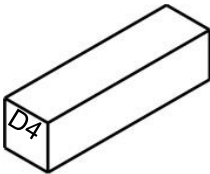
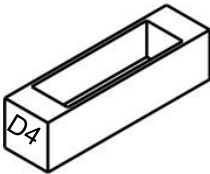
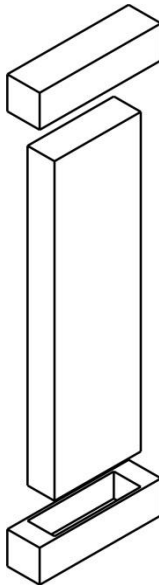
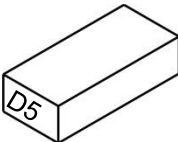
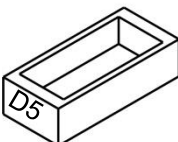

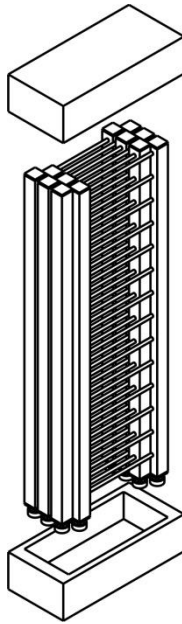
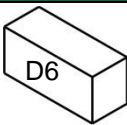
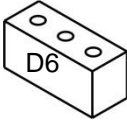

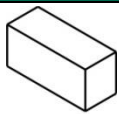

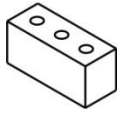
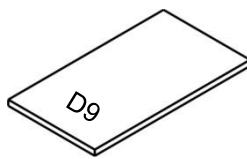
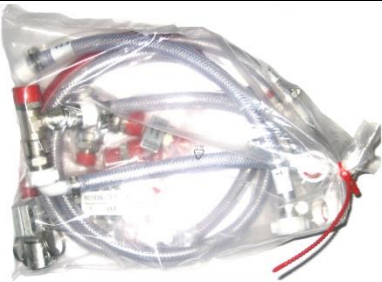

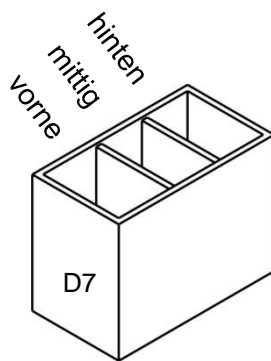



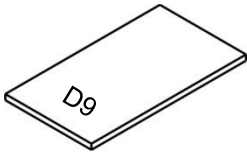





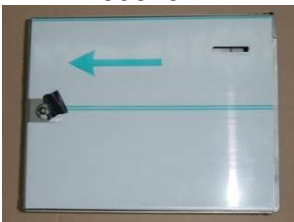



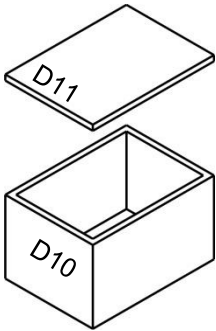
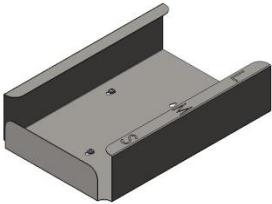
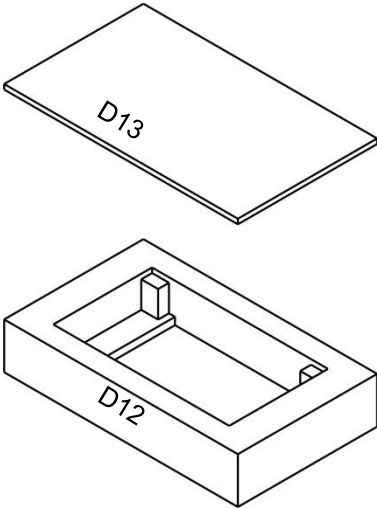

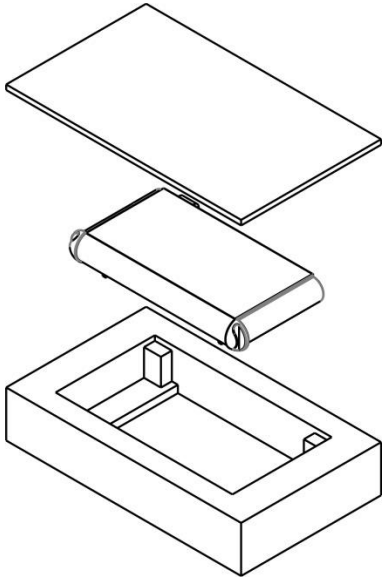
Abb. 12: Schrank D Explosionszeichnung

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>604214-D2 604523-D1</p>	<p>1x 600336, dazwischen 2x 600337</p>  <p>4x 603039</p>	 <p>Die beiden Einsätze für OP-Schuhe ineinanderstellen, in den Wagen schieben, mit 4 Klettbindern befestigen, dann Wagen mit den Rädern nach oben in die Schaumstoffschachtel packen</p>
 <p>4x 604452-D3</p>	 <p>4x 600148</p>	

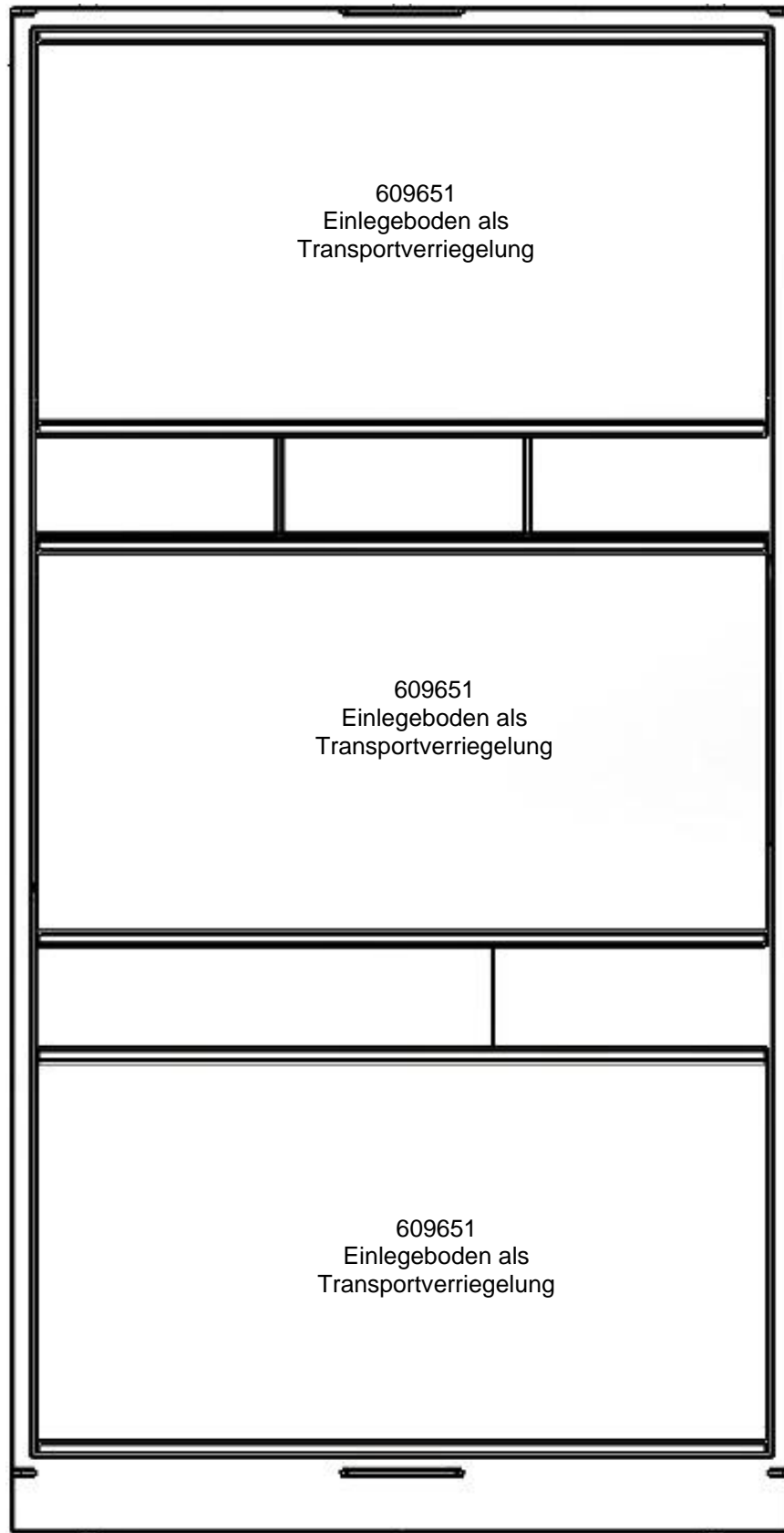
Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
  2x 604569-D4	1x 605103 (Ausgleichstisch L/B/H 1100/320/100)	
  2x 604558-D5	 6x 600590 1x 606091 Klettband 50 mm / 1,4 m	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
  <p>2x 604611-D6</p>	 <p>3x 600591</p>	  
 <p>604543-D9</p>	 <p>606103</p>	
 <p>604597-D7</p>	 <p>2x 600842</p>  <p>600474 600538 603733</p>	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 604543-D9	 600419  607337  603055, 603056, 603057, 603058  605740 609935  606101  600525	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>604610-D11 604609-D10</p>	 <p>2x 606563 liegend</p>	
 <p>2x 604608-D13 2x 604607-D12</p>	 <p>2x 600606 2x 600607</p>	

6. Schrank E



Schrank E gepackt mit Transportverriegelung

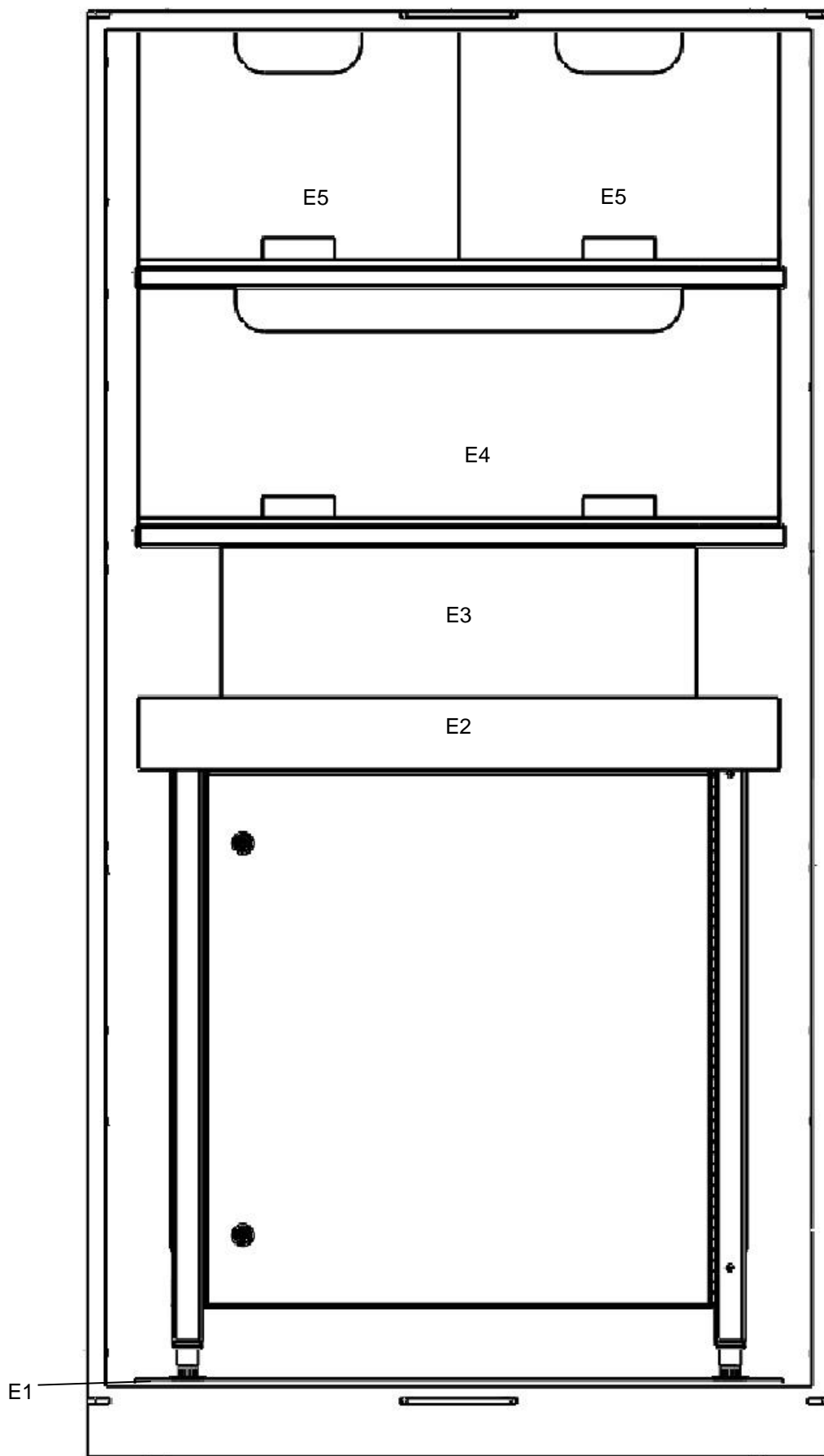


Abb. 13: Schrank E gepackt ohne Transportverriegelung

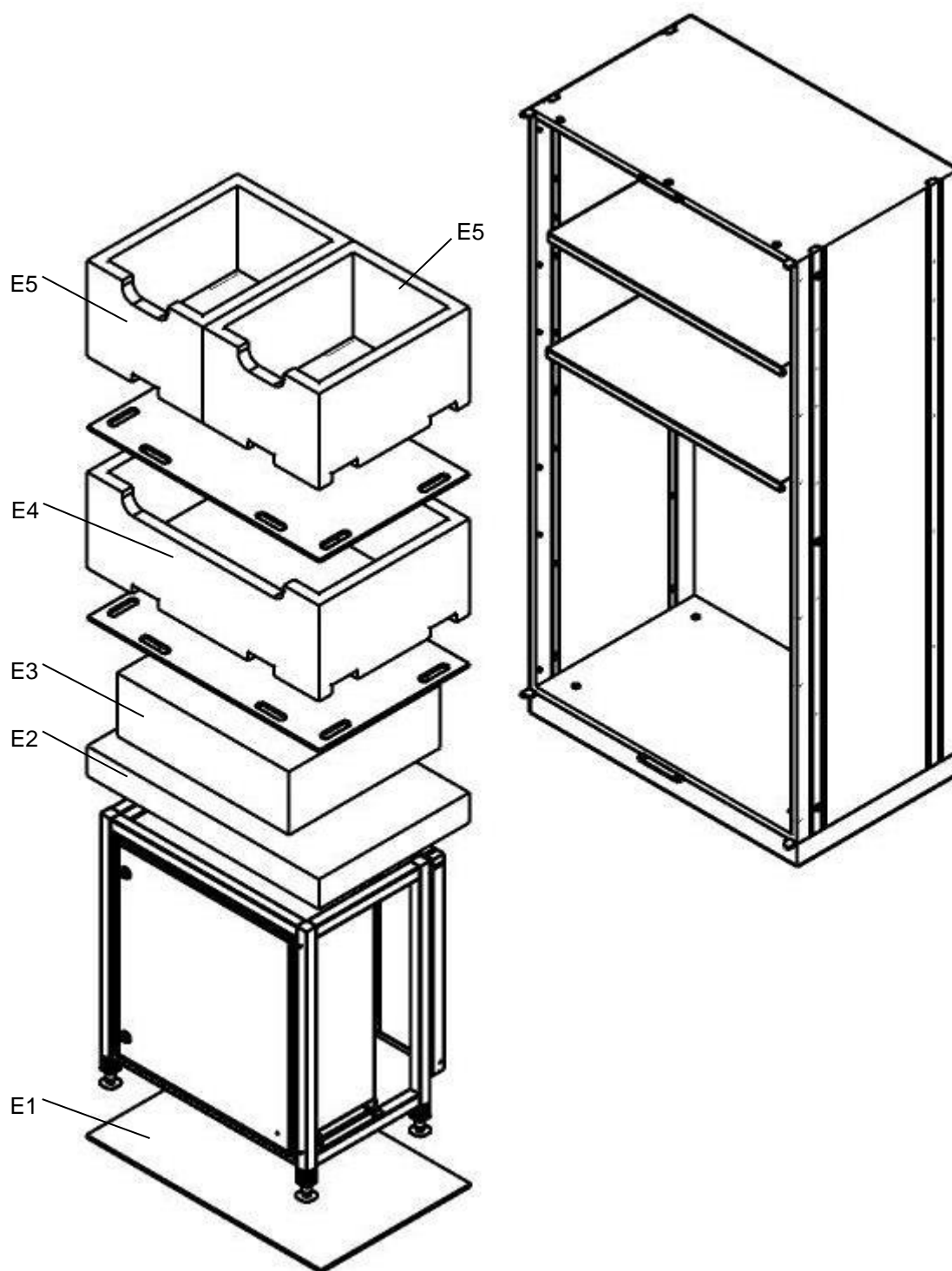
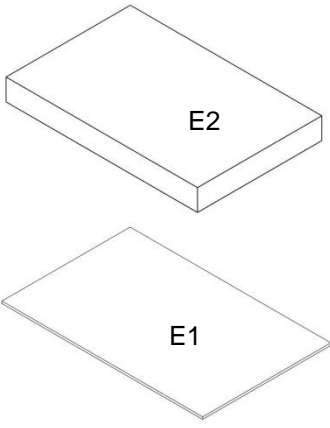
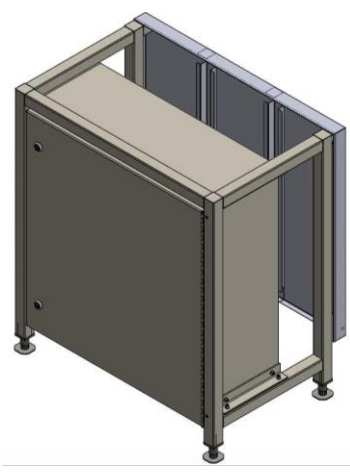
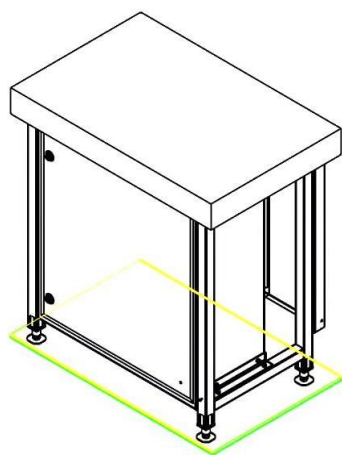
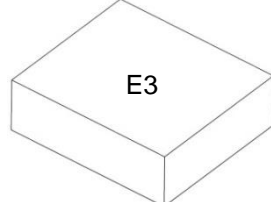
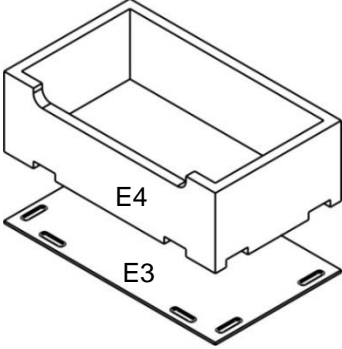
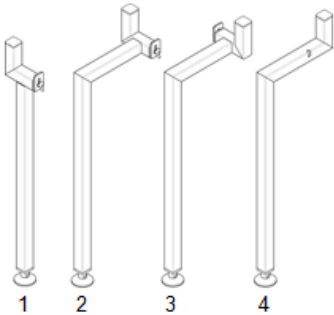
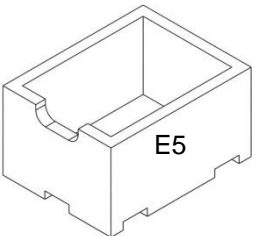

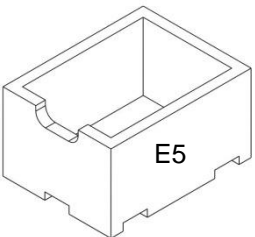



Abb. 14: Schrank E Explosionszeichnung

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>E2 E1</p> <p>609817-E2 609819-E1</p>		
 <p>E3</p>	---	---
 <p>E4 E3</p> <p>609816-E4 609818-E3</p>	 <p>1 2 3 4</p>	
 <p>E5</p> <p>609815-E5</p>	 <p>Unterverteilung UV1</p>	
 <p>E5</p> <p>609815-E5</p>	 <p>Unterverteilung UV2</p>	

7. Schrank F

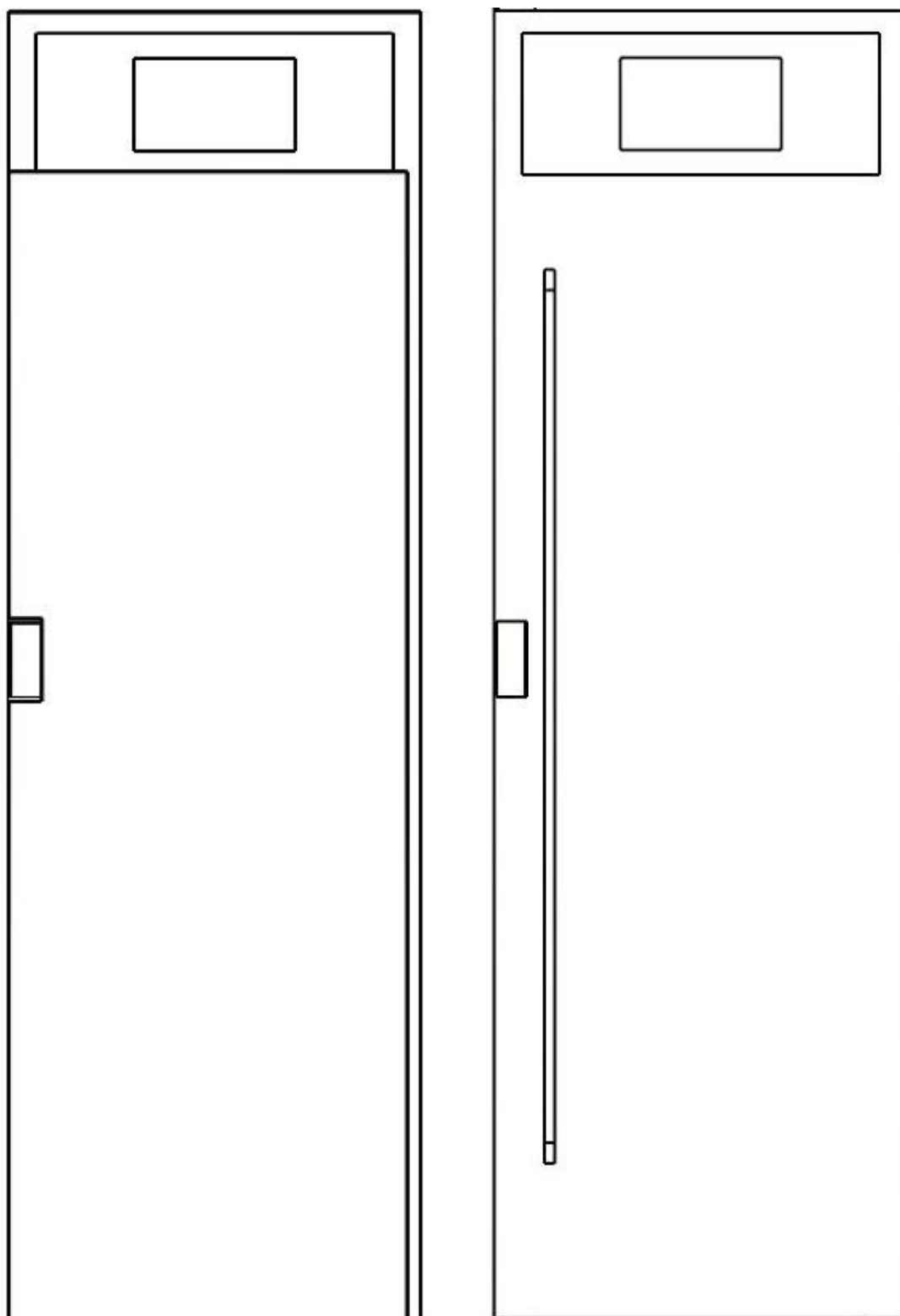
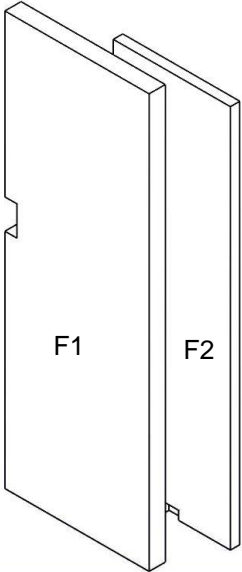
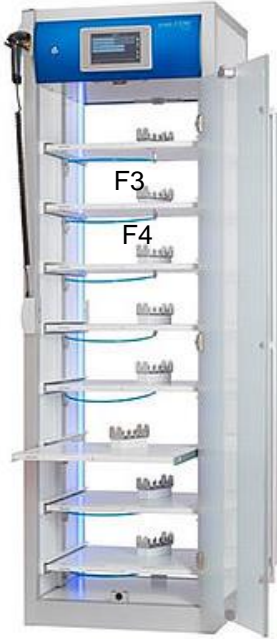
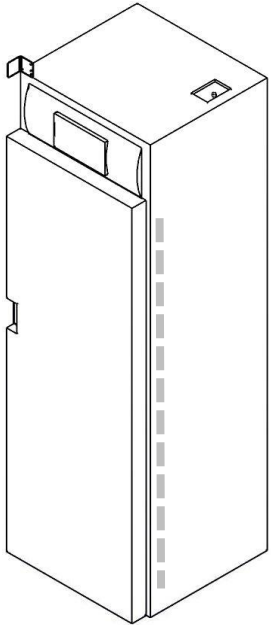
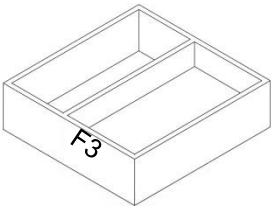

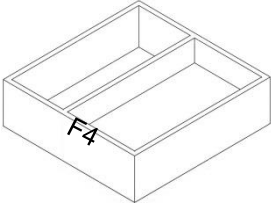




Abb. 15: Schrank F Transportzustand und Betriebszustand

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>609821-F1 609822-F2</p>		
	<p>Konnektoren</p> <p>609469 609470 609471 609472 609473 609474 609475 609476</p>	
	 <p>608093 609931</p>	

8. Schrank G

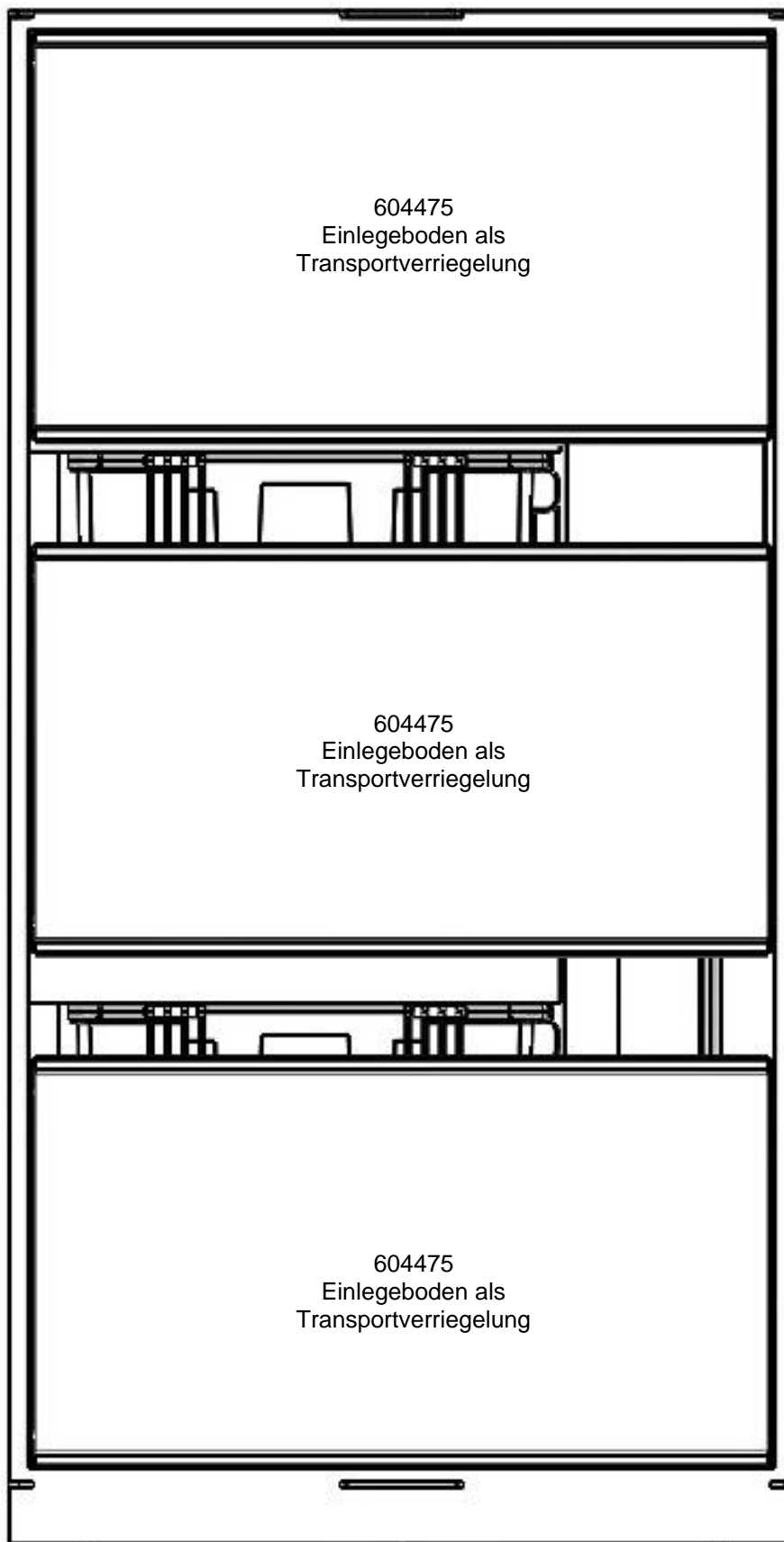


Abb. 16: Schrank G gepackt mit Transportverriegelung

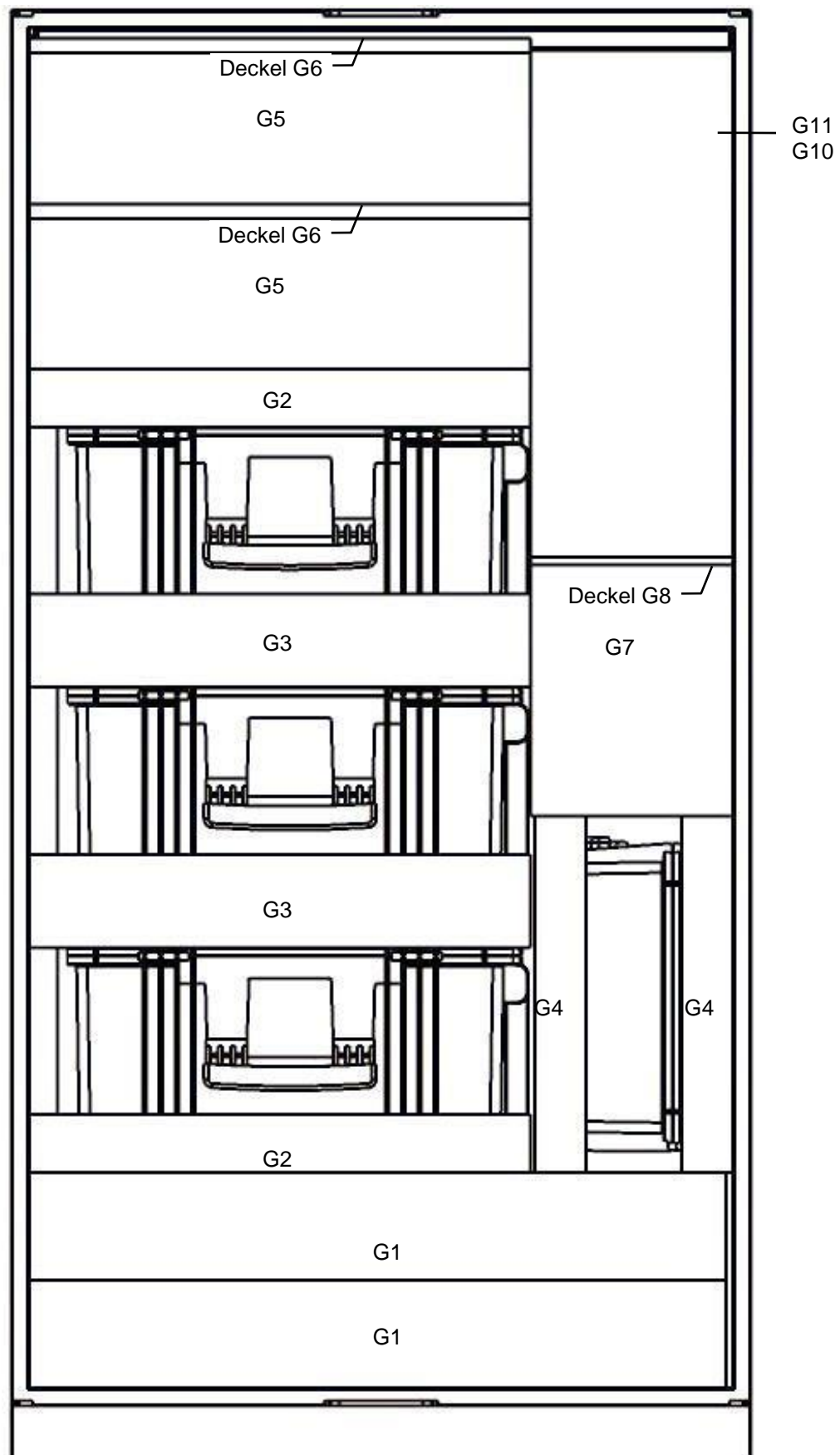


Abb. 17: Schrank G gepackt ohne Transportverriegelung

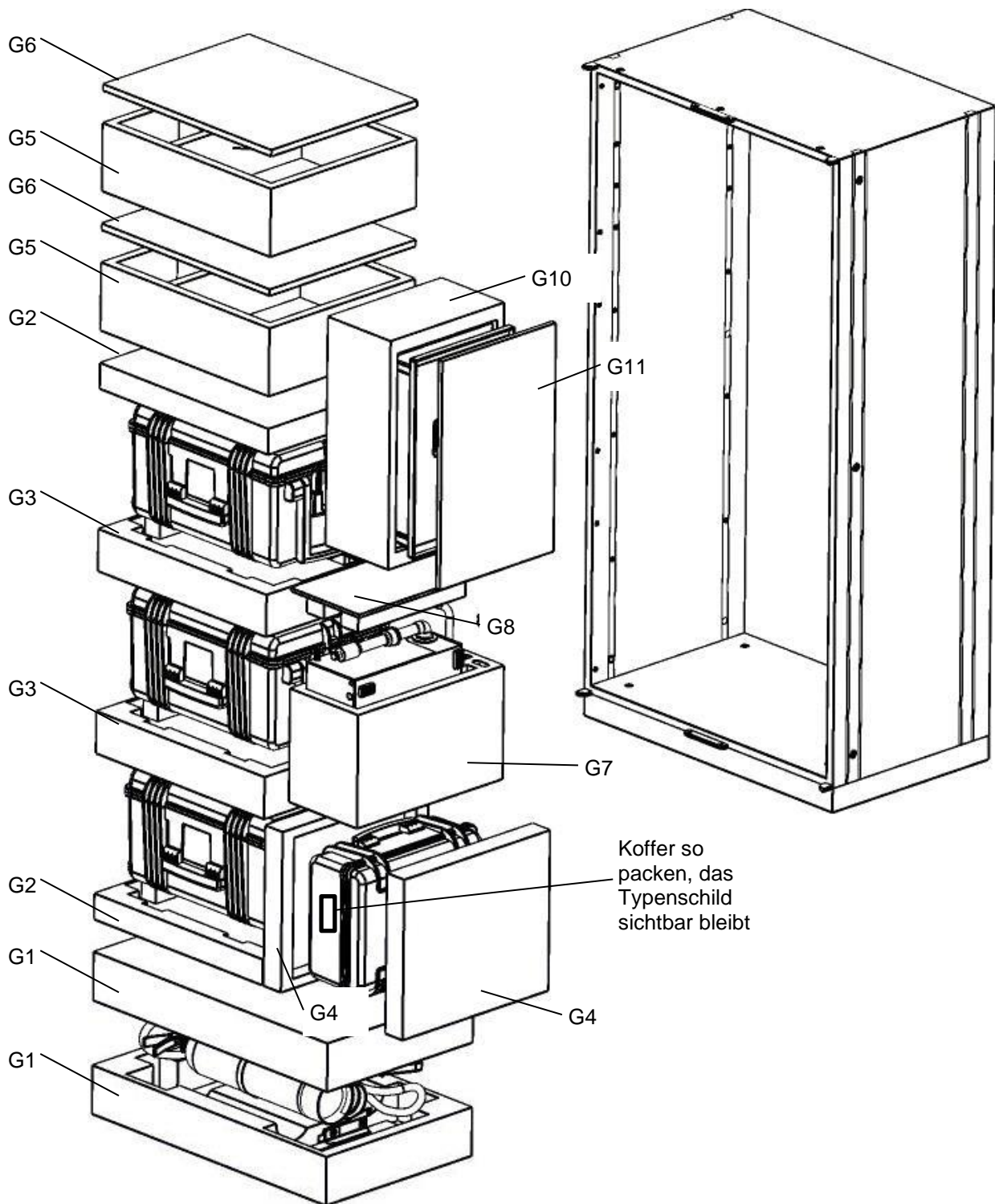
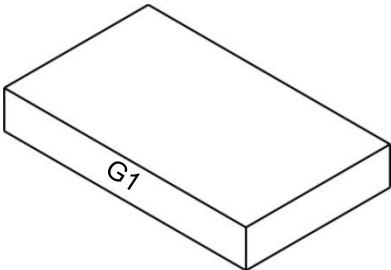
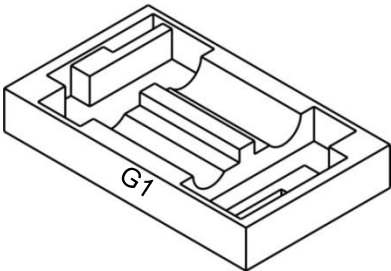


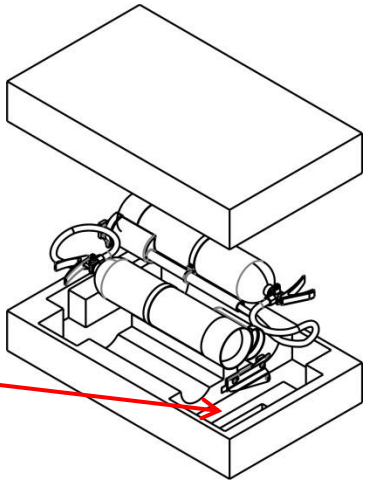
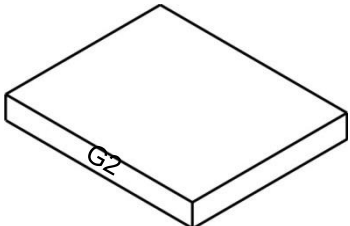
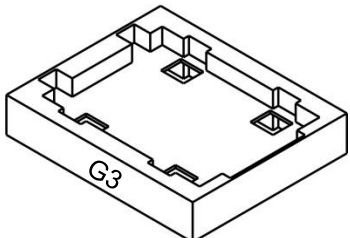
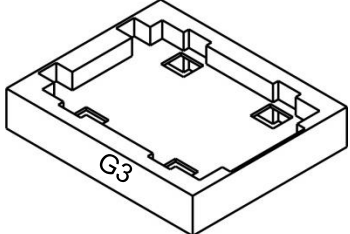
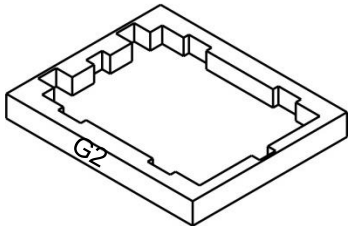



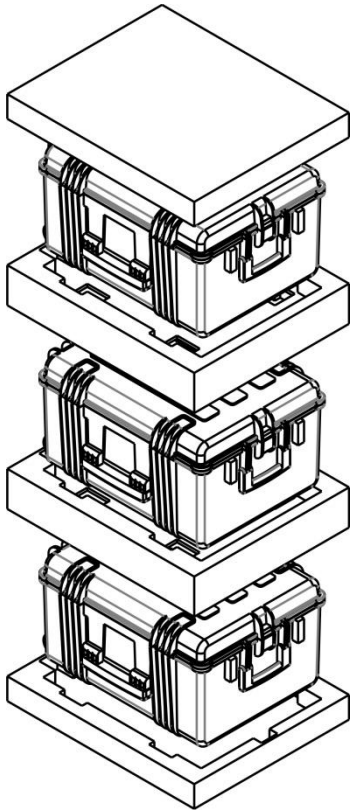
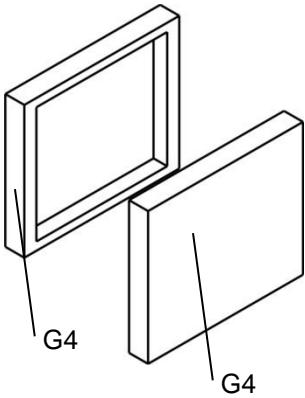

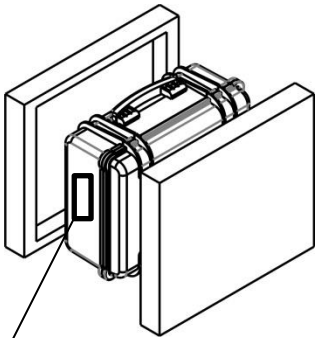
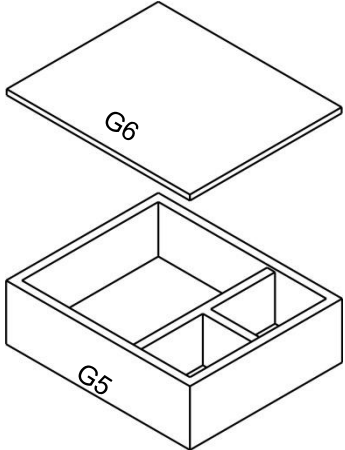
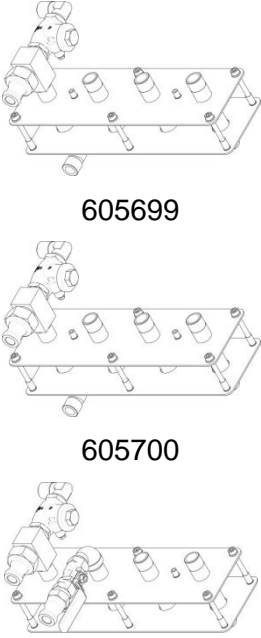
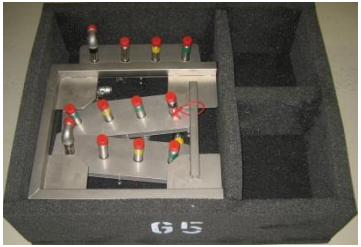
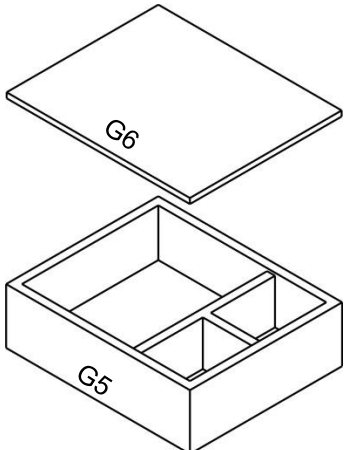


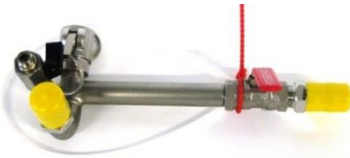

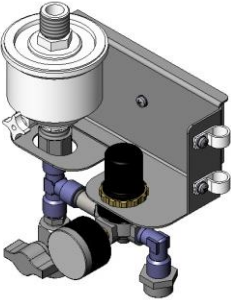





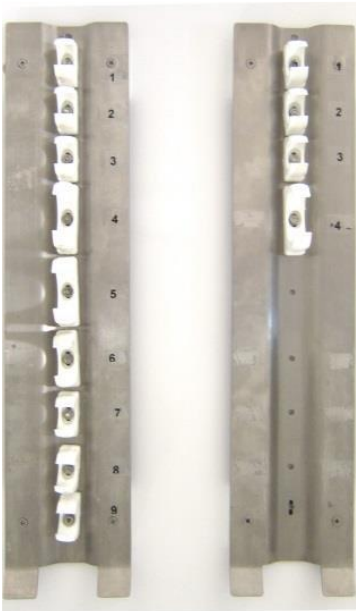





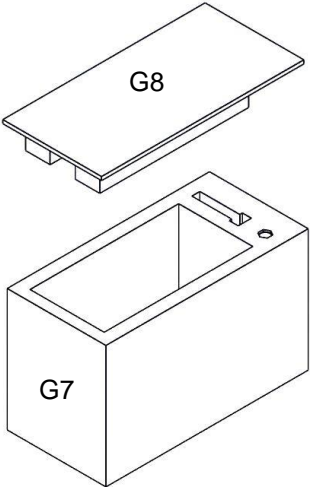


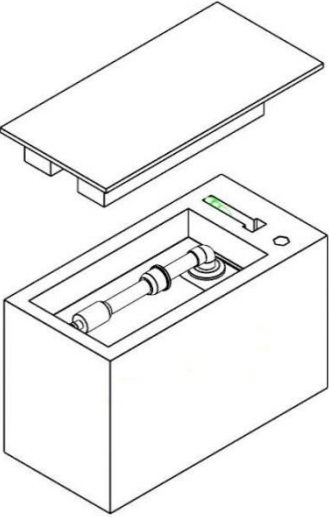
Abb. 18: Schrank G Explosionszeichnung

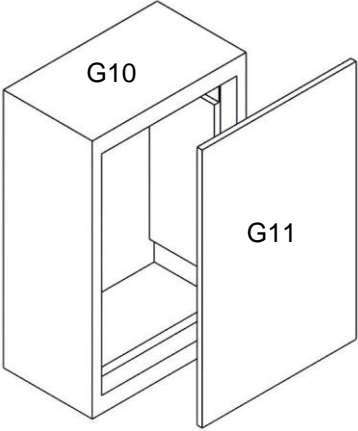



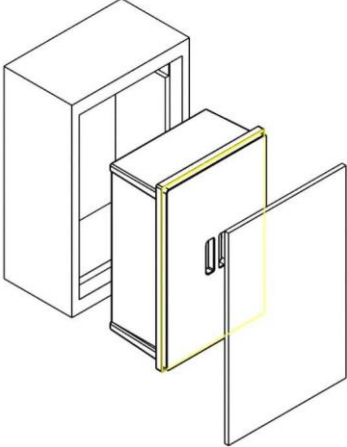
Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
  <p>2x 604602-G1</p>	 <p>2x 600283</p>  <p>1x 600491</p>	
    <p>2x 604225-G3 2x 604226-G2</p>	  	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>2x 604458-G4</p>		 <p>Koffer so packen, dass das Typenschild sichtbar bleibt</p>
 <p>604562-G6 604455-G5</p>	 <p>605699 605700 605701</p>	
 <p>604562-G6 604455-G5</p>	 <p>604883 604885</p>	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
	 604887	
	 605995	
	 605663	
	 606092	
	 604110	
	 3x 600476	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
	 <p>3x 600575</p>  <p>3x 605477 1x 605884</p>  <p>2x 600742</p>  <p>1 x 600860</p>	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>609827-G8 609826-G7</p>		 

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>609824 G10 609825 G11</p>	 <p>1 x 606594</p>  <p>Patchkabel und RS 232-Kabel gemäß Inhaltsliste Schrank G</p>	 

9. Schrank H

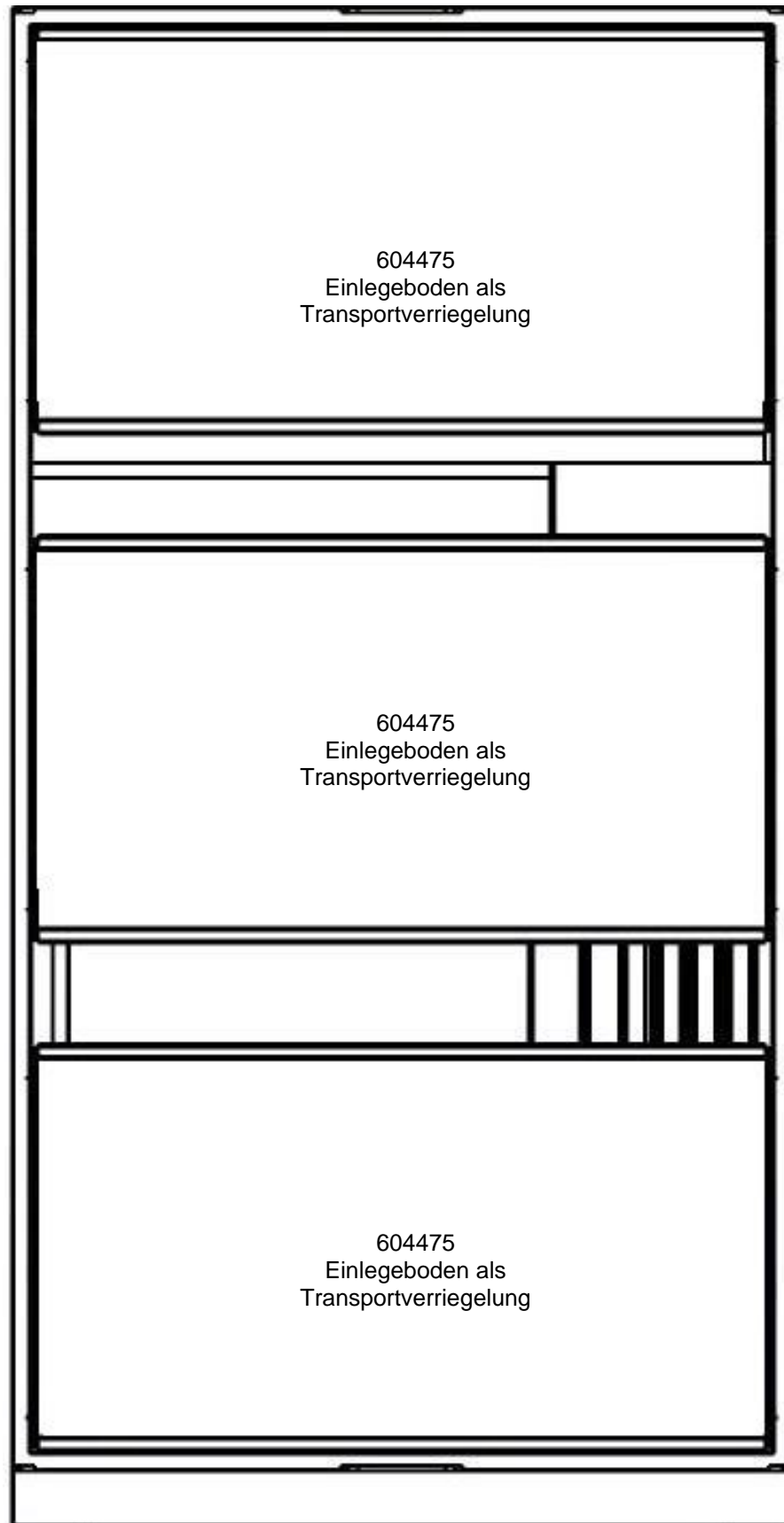


Abb. 19: Schrank H gepackt mit Transportverriegelung

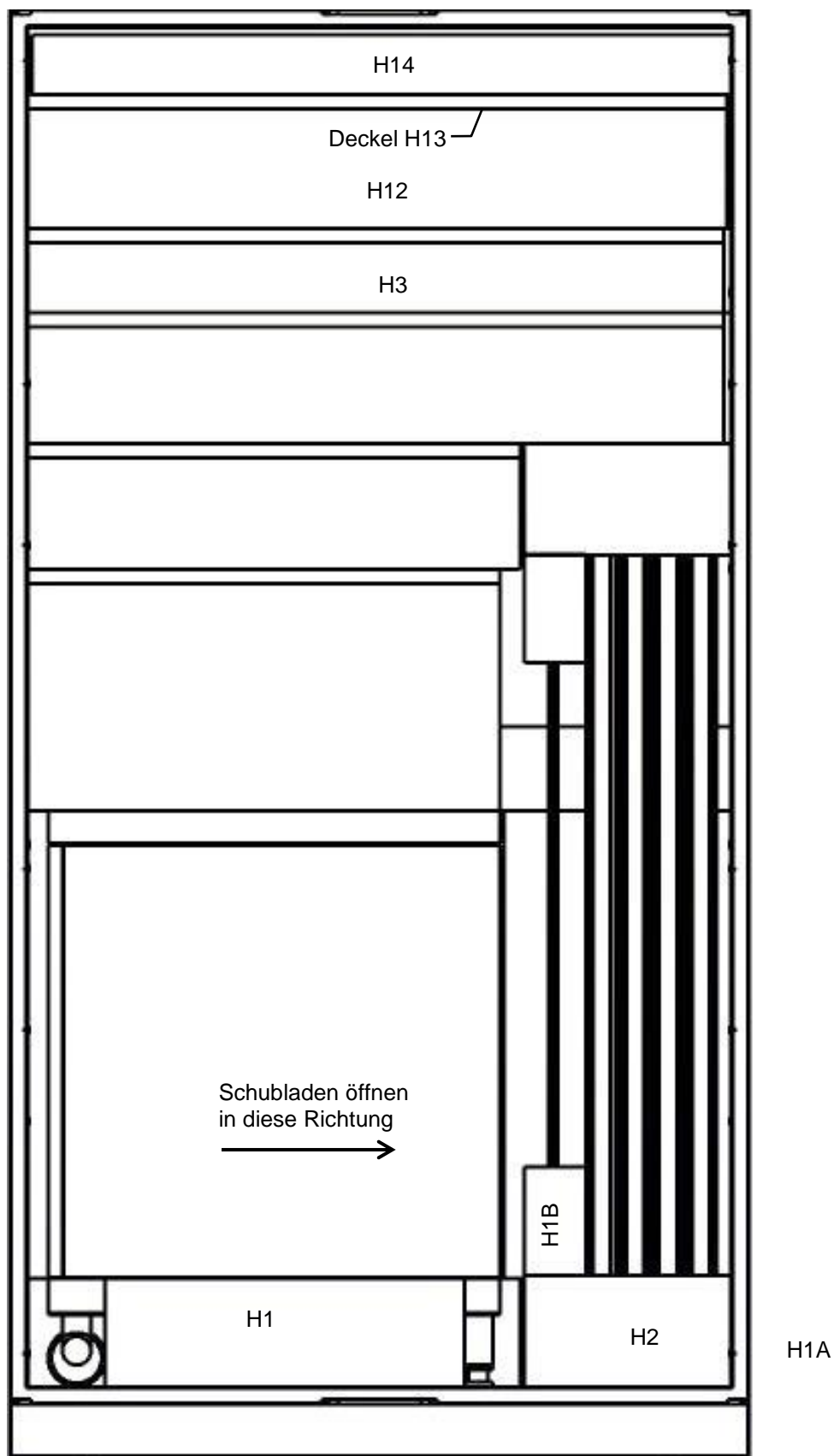


Abb. 20: Schrank H gepackt ohne Transportverriegelung

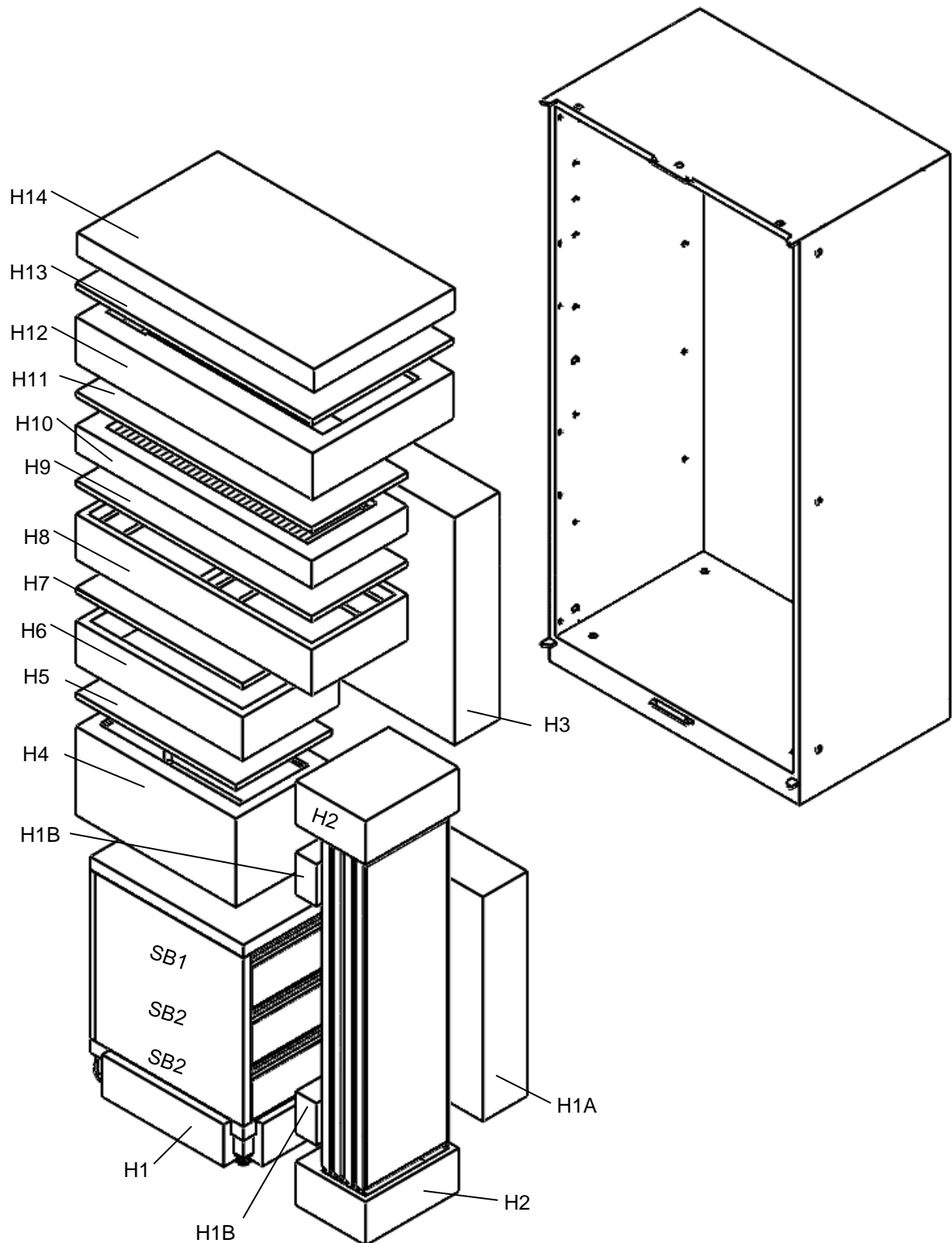
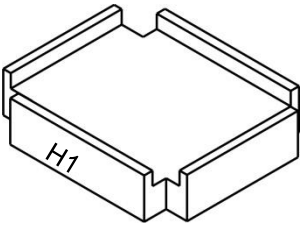

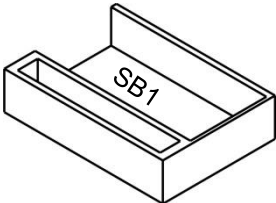

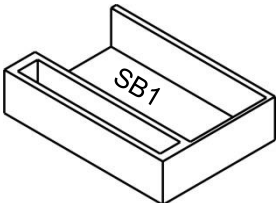



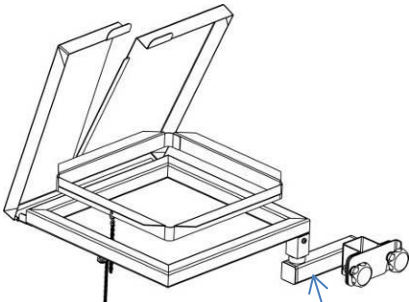
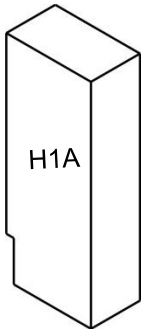
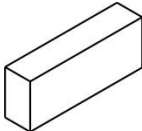
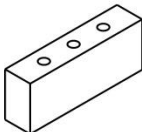
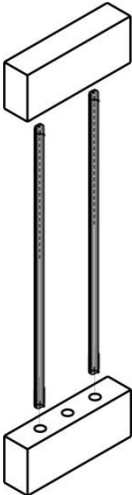
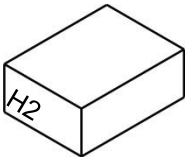
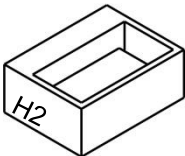

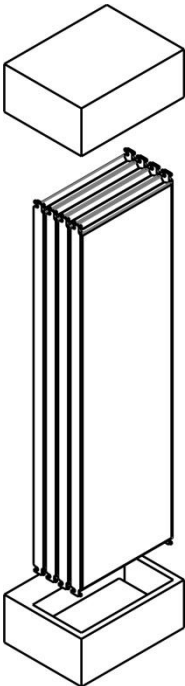
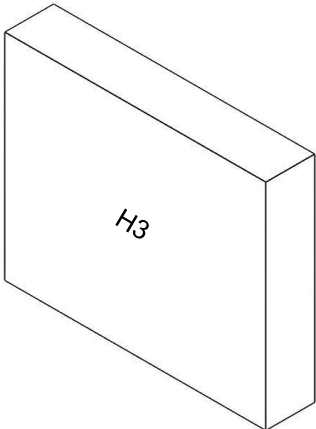
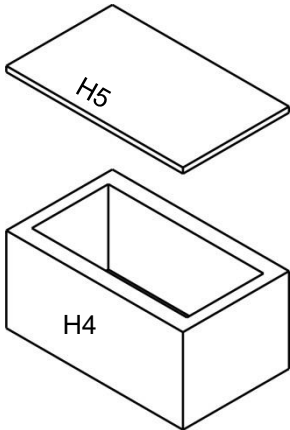
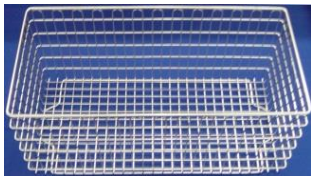
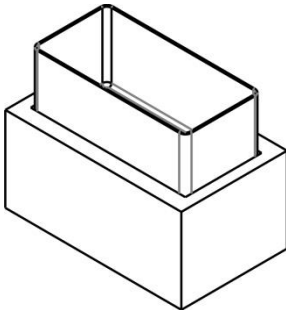
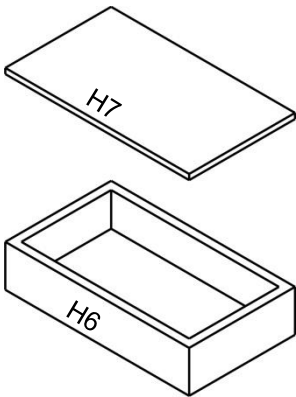
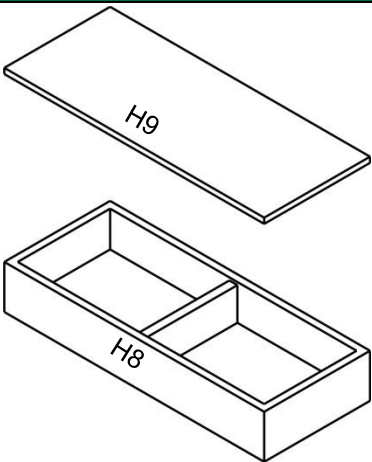

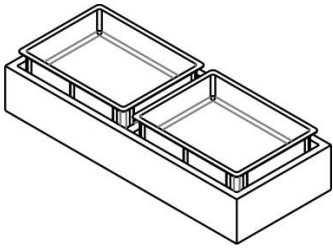
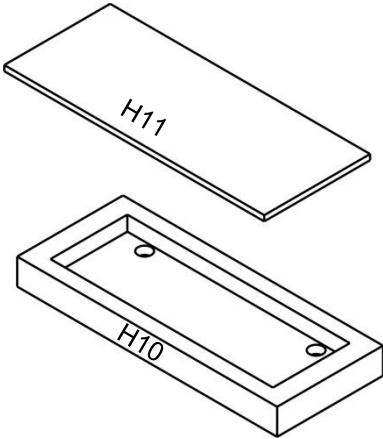

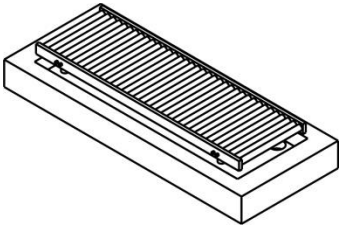
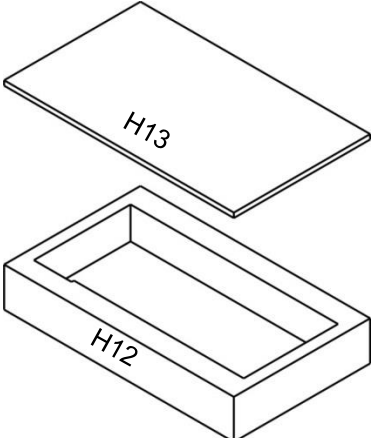

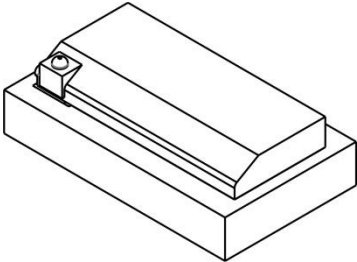
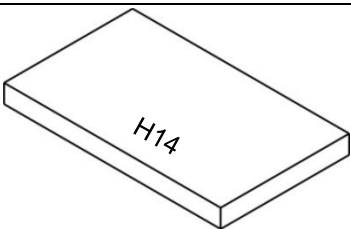


Abb. 21: Schrank H Explosionszeichnung

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 604594-H1	 600146 Schubladenblock reiner Bereich (Prozessdokumentation)	
 604592-SB1	 2x 601723	
 604592-SB1	 600149	
 604592-SB2	 2x 600536  601728 demontiert	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 604617-H1A	Füllstück	---
  2x 604615-H1B	2x 600588 (Diagonalverstrebung Schleusenregal)	
  2x 604581-H2	 8x 600587 (Einlegeboden Schleusenregal)	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>610033-H3a</p>	Füllstück	---
 <p>604590-H5 604579-H4</p>	 <p>600148</p>	
 <p>604583-H7 604582-H6</p>	leer	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 <p>604587-H9 604586-H8</p>	 <p>2x 600395</p>	
 <p>604585-H11 604584-H10</p>		
 <p>604591-H13 604589-H12</p>		
 <p>604624-H14</p>	<p>Füllstück</p>	<p>---</p>

10. Schrank I

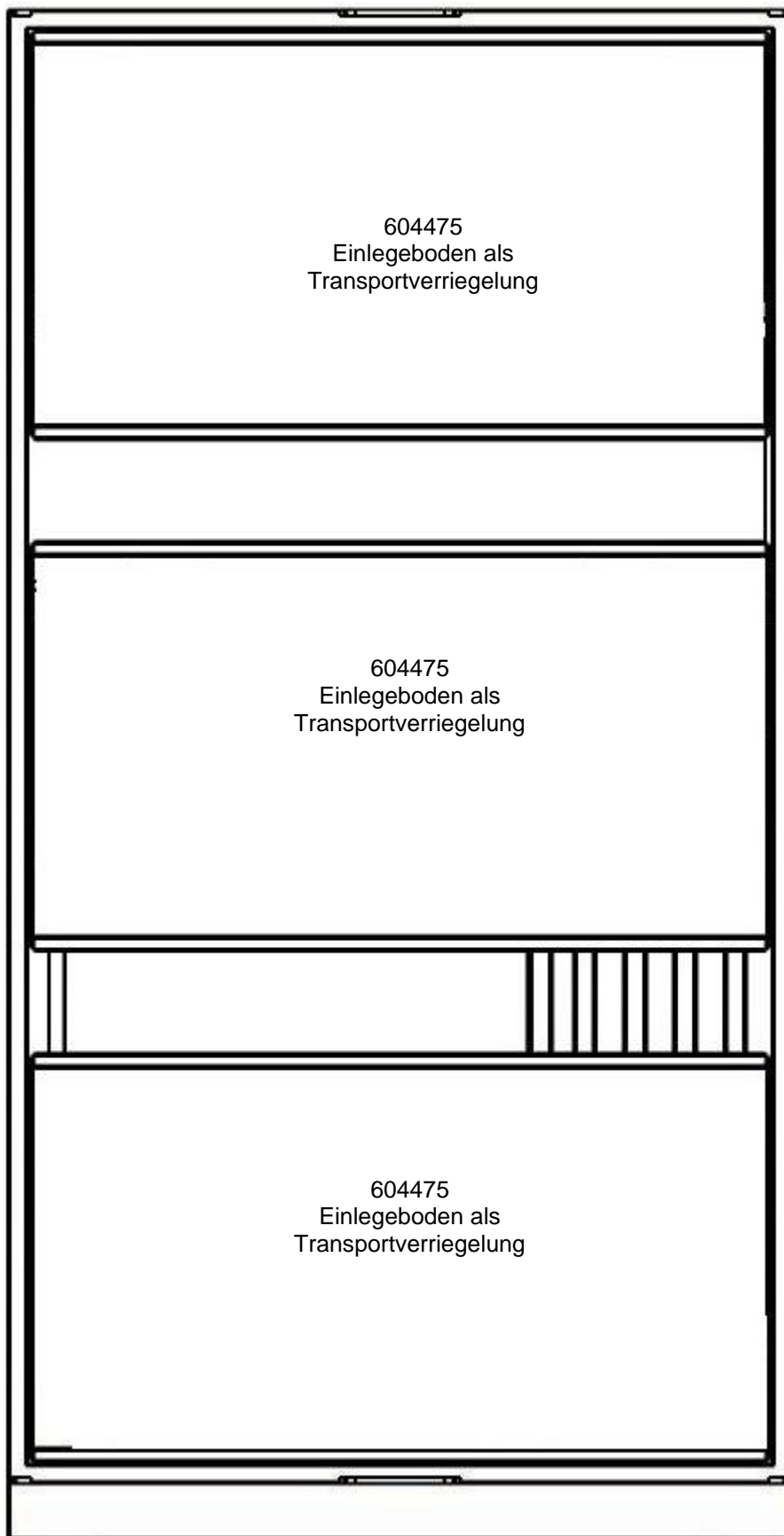


Abb. 22: Schrank I gepackt mit Transportverriegelung

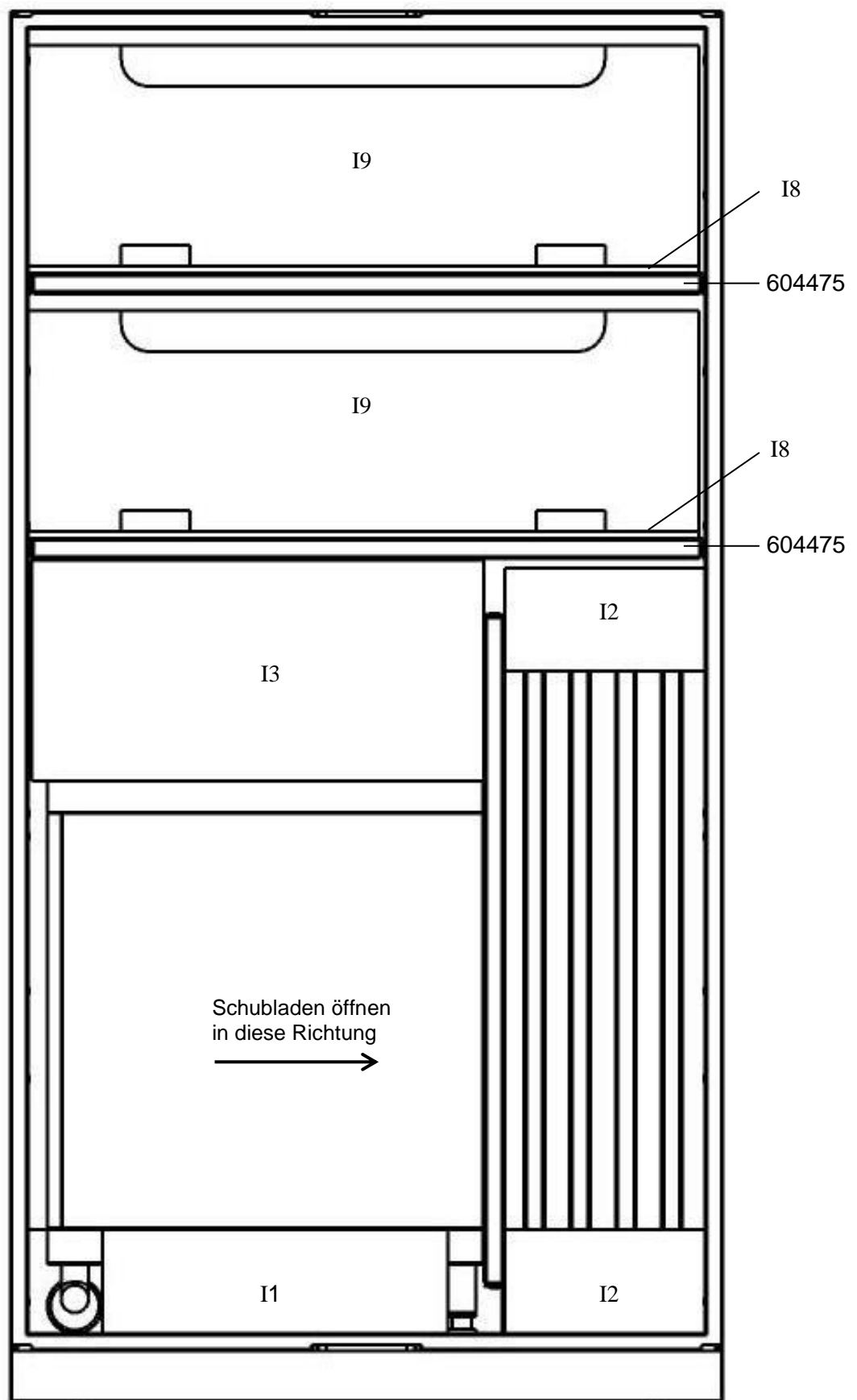


Abb. 23: Schrank I gepackt ohne Transportverriegelung

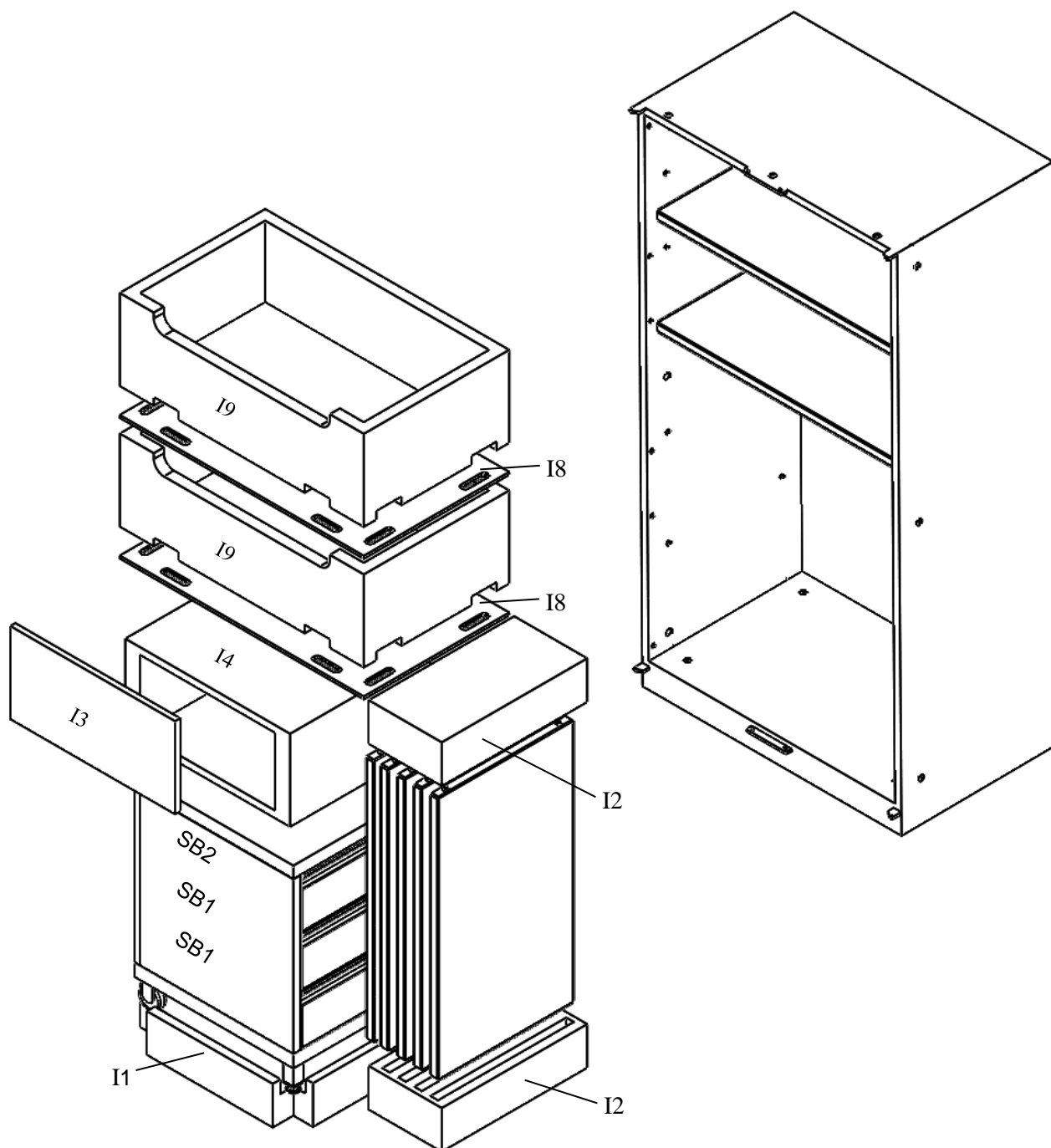
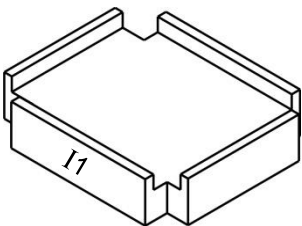


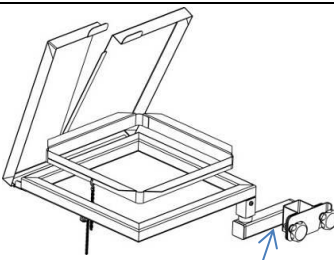
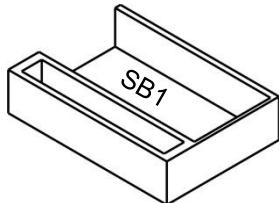


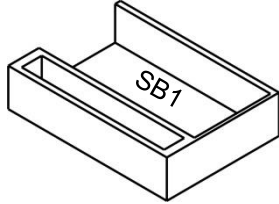

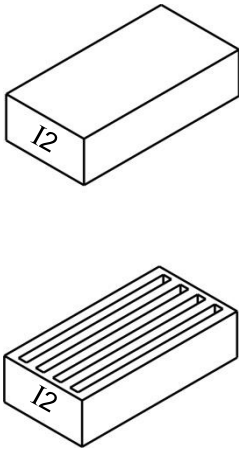
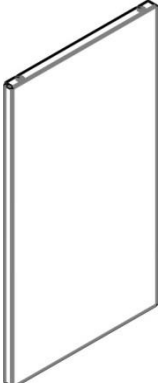
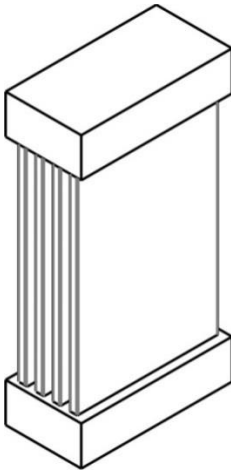
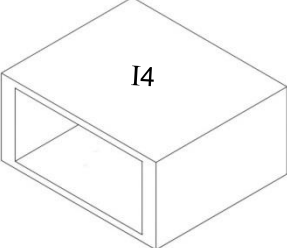
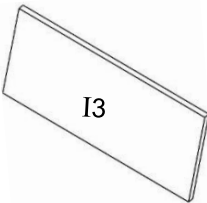


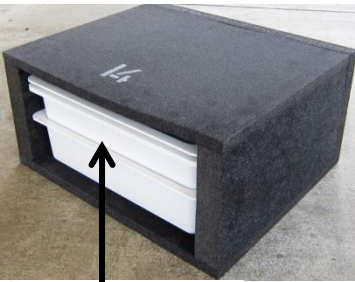
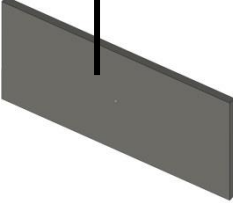
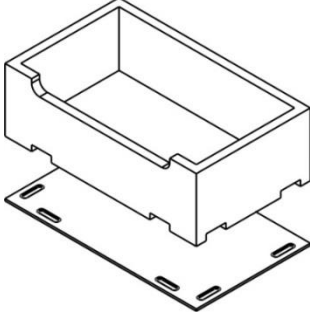

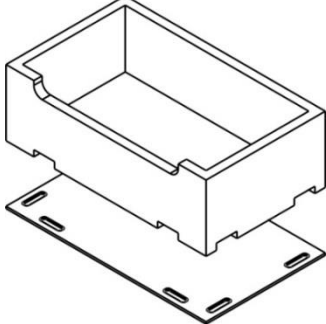



Abb. 24: Schrank I Explosionszeichnung

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 604594-I1	 600146 Schubladenblock reiner Bereich (Packtische)	
	 601728 demontiert	
 604594-SB1	<p>In der mittleren Schublade</p>  600149  2x 600081 2x 600458 2x 600080	
 604594-SB1	<p>In der unteren Schublade</p>  601724	

Verpackungsmaterial	Inhalt	Verpackungseinheit
 2x 604621-I2	 5x 604475	
 609997-I4  609998-I3	 2 x 609439 2x 609440  609441 609442	 
	Abwasserschläuche gemäß Inhaltsliste Schrank I	
	Schläuche für Leitungswasser, Permeat und VE-Wasser gemäß Inhaltsliste Schrank I	

11. Anbringen der Transportverriegelung



ACHTUNG!

Für das Anbringen der Transportverkleidung sind 2 Personen erforderlich.

Bei Nichtbeachtung können die Schränke beschädigt und Personal verletzt werden.

Setzen Sie die Einlegeböden Transportverkleidung ein, um ein Verkratzen der Schränke zu vermeiden.



GEFAHR!

Verletzungsgefahr an den Kanten der Blechteile. Beim Hantieren mit den Einlegeböden Schutzhandschuhe tragen

Fetten Sie die Schrauben mit Kupferpaste ein.

Während eine Person den Einlegeboden festhält, befestigt ihn die zweite Person mit 4 Schrauben.

12. Wichtige Anschriften

Bei Störungen des Gerätes sind folgende für den Betrieb Verantwortliche zu benachrichtigen:

Betreiber:

Name:

Tel:

Hersteller, Lieferant und Werkskundendienst:

HP Medizintechnik GmbH
Bruckmannring 34
85764 Oberschleißheim

Tel: +49 89 4535194 - 50
Fax.: +49 89 4535194 - 90
Internet: www.hp-med.com
Email: info@hp-med.com

Raum für weitere Eintragungen

Name:

Tel:

Änderungen vorbehalten

HP Medizintechnik GmbH

85764 Oberschleißheim

Bruckmannring 34

Telefon: +49 89 4535194 - 50

<http://www.hp-med.com>

E-mail: info@hp-med.com