



Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung



Der Lagerungsschrank darf ausschließlich von Fachpersonal mit ausreichender Schulung in der Benutzung des Gerätes bedient werden.

1

Login-Maske öffnen:

Klicken Sie den Menü- und anschließend den Login-Button.



2

Einloggen als User oder Admin:

Loggen Sie sich als User oder Admin mit Ihrem Barcode und ggf. Passwort ein.



Benutzer :#2
Passwort: 88

3


Auszüge zurücksetzen -Button auswählen



4

Auszüge zurücksetzen:

Entsprechende Endoskope/Auszüge einzeln auswählen (User und Admin) oder alle Auszüge zurücksetzen (Admin).

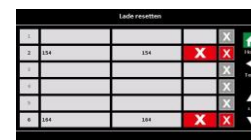

5

Den Vorgang mit *OK* bestätigen.

